

## NÄR SKA JAG VÄLJA ELRULLSTOL FORTRESS CALYPSO ELLER STERLING ELITE 2 PLUS?

---

### **Sterling Elite 2 plus**

- När patienten väger över 90 kg.
- När patienten har väldigt långa ben.
- När miljön är mer krävande, till exempel ojämn, backig eller kuperad (har lite mer fjädring än Calypso).

### **Fortress Calypso**

- När behovet är att ta sig fram i små utrymmen, till exempel affärer.
- När patientens närmiljö är planerad stadsmiljö med asfalterade gång- och cykelbanor eller lantlig miljö som tillåter den mindre modellen.
- När körkomforten kommer i andra hand på grund av att en större modell av elrullstol inte fungerar i patientens närmiljö (omgivning, hiss, förvaring).

### **Övrig information som kan påverka valet av modell på elrullstol**

Sterling Elite 2 plus har ett känsligare körreglage med viss fördröjning och kan på grund av detta vara mer svårkörd. Kräver bättre hand-/fingermotorik.