

Hjälpmiddelsentrum utbildar

Gång- & skyddshjälpmedel



Ansvariga hjälpmedelskonsulenter

Björn Flennersjö, tel.nr 070–2570022
bjorn.flennersjo@regionvastmanland.se

Susanne Pettersson tel.nr 070–2665255
susanne.petterson@regionvastmanland.se

2024

Innehåll

Förskrivningsregler	4
Artikelansvar (tidigare nivåindelning):	4
Förskrivningskriterier	4
Ersättningskedjor	5
Gånghjälpmedel	6
Rollatorer.....	6
Rebel	6
Carl-Oskar	6
Futura	8
Futura med HP-handtag	10
Futura med tvärhandsgrepp.....	10
Futura med enhandsbroms.....	10
Gemino 20	11
Fellow	11
RA-rollatorer.....	13
RA-rollator Rebel, Staffan och Carl-Oskar.....	13
Volaris.....	14
Alpha Basic.....	14
Gåbord med patientbroms.....	15
Gåbord Rebel, Staffan och Carl-Oskar.....	15
Alpha Basic.....	15
Gåbord Bure.....	16
Gåbord Bure el och gasfjäderhöjt samt Bure double	16
19	
Bure Rise & go.....	19
21	
Gånghjälpmedel för tunga brukare.....	21
Maxi plus.....	21
Rollator Carl-Oskar, förstärkt modell.....	22
Gåbord Bure el XL	23
Kryckkäpp	24
Fyrpunktsstöd	24
Betastöd	24
Gåstol.....	25
Meywalk 2000.....	25
Meywalk MK4	27
Dynamic Pacer	28
Vårdbälten.....	30
Modeller	30
Flexibelt, Hug	30
Easybelt, Hug.....	31
EasyBelt.....	31
Modeller	31
FlexiBelt	32

Modeller	32
Höftskyddsbyxor	33
SafeHip airX Unisex	33
SafeHip AirX open.....	33
SafeHip Active.....	33
Hjälmor	34
Mjuk hjälm Ribcap	34
Skyddskeps Baseball	Midi/Maxi..... 34
Skyddsmössa Lenny Antracit.....	34
Skyddshjälm Hardy	35
Skyddshjälm Kate	35
Hård hjälm Hea.....	36
Övriga Gånghjälpmedel.....	37
Fyrpunktsstöd.....	37
Betastöd	37
37	
Axillarkryckor	38
RA-kryckor	38

FÖRSKRIVNINGSGREGLER

Artikelansvar (tidigare nivåindelning):

Artikelansvar (tidigare nivåindelning):	
Ansvar 1	Regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel är hjälpmedel som är komplexa och kostsamma till exempel eldrivna rullstolar, kommunikationssystem samt tillbehör till dessa.
Ansvar 2	Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel på hjälpmedel är manuella rullstolar och rollatorer.
Ansvar 3	Rekviritionshjälpmedel. Enklare hjälpmedel som inte förskrivs via Hjälpmedelscentrum. Beställs till enheten, oftast i större antal. Hjälpmedlen är försäljningshjälpmedel. Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Hjälpmedel som används i hemsjukvård betalas av Region Västmanland. Exempel på hjälpmedel är badbräda och förhöjningsklossar.
Ansvar 4	Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Kommunen har betalningsansvar för patienter som bor i särskilda boendeformer men beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel på hjälpmedlen är omvårdnadshjälpmedel som personlyftar, dusch- och toalettstolar på hjul och reglerbara sängar.

Förskrivningskriterier

Artikel	Kriterier/utprovningrutin	Kommentarer
Gånghjälpmedel som hanteras med en arm (käpp, krycka, bock)	Kompensera nedsatt gångförmåga.	Patient betalar käpp och kryckkäpp själv, säljs via ex Varsam och Klädvalet.
Betastöd (gångstativ)	Kompensera nedsatt gångförmåga. Behov av stabilitet.	
Rollatorer	Kompensera nedsatt gångförmåga. Enklare hjälpmedel är otillräckliga. Rollator nr 3 är egenansvar.	Låneavgift för rollator nr 2 är 500 kr (S-09547, avvakta med att lägga in avgiften tills efter utvärderingen).
Gåbord	Kompensera nedsatt gångförmåga. Enklare hjälpmedel är otillräckliga.	RA-rollator likställs med gåbord.

Gåstol	Gåstol kan förskrivas för att kompensera nedsatt gångförmåga när enklare gånghjälpmedel inte ger tillräckligt stöd.	Provas ut i samråd med hjälpmedelskonsulent.
Bälten	Hjälp vid förflyttningar och uppresning	Är hyreshjälpmedel
Höftskyddsbyxor	Skydd vid fall	Försäljningsartikel
Hjälmor	Skydd vid fall	Försäljningsartikel

Ersättningskedjor

Ersättningsgrupper används för att föreslå alternativa/ersättningsartiklar för att på så sätt använda artiklar i lager först.

Ersättningsartikel

Vid beställning av en artikel som utgått ur sortiment, visar webSesam alltid en ersättningsartikel. Ersättningsartiklar visas även om den nya artikeln finns i lager. Ersättningsartiklar visas endast då de har saldo. I dagsläget finns inga tvingande byten på barnsortimentet så man kan alltid välja vilken artikel man önskar få.

Alternativ artikel

Vid beställning av en artikel som inte finns i lager för leverans, visar webSesam likvärdiga alternativ.

GÅNGHJÄLPMEDEL

Rollatorer

Vid förskrivning av rollator nummer två ska artikel 09547 läggas (låneavgift 500kr). Om det är osäkert att patienten ska behålla två rollatorer, ska artikeln läggas i efterhand.

OBS! Kom ihåg att informera patienten om avgiften.

Rebel

Leverantör www.humancare.se

Rollator markerad med fet stil är standardrollator.



Modeller

Art.nr	Höjd handtag	Bredd	Sitshöjd	Sittbredd	Vikt	Max brukarvikt
14885 Rebel 57 Smal	75-93 cm	57 cm	62 cm	37 cm	9,5 kg	140 kg
14887 Rebel 62*	75-93 cm	62 cm	62 cm	42 cm	9,6 kg	140 kg
41953 Rebel 62 Låg	68-86 cm	62 cm	54 cm	42 cm	9,4 kg	140 kg
36458 Rebel 67	75-93 cm	67 cm	62 cm	47 cm	9,7 kg	140 kg
41938 Rebel 67 Hög	82-100 cm	67 cm	62 cm	47 cm	9,7 kg	140 kg

*= Finns som färdig med enhandsbroms. Artikel.nr 42101 för höger och 42102 för vänster.

Carl-Oskar

Leverantör www.humancare.se

Rollator markerad med fet stil är standardrollator.









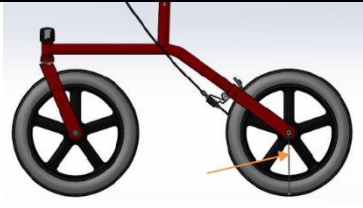

Modeller

Art.nr	Höjd handtag	Bredd	Sitshöjd	Sittbredd	Vikt	Max brukarvikt
32768 C-O 57 Smal	77-95 cm	57 cm	64 cm	37 cm	11,1 kg	150 kg
10534 C-O 62 std*	77-95 cm	62 cm	64 cm	42 cm	11,3 kg	150 kg
41954C-O 62 hög	82-100 cm	62 cm	64 cm	42 cm	11,3 kg	150 kg
10535 C-O 67	77-95 cm	67 cm	64 cm	47 cm	11,4 kg	150 kg
11313 C-O 72	77-95 cm	72 cm	64 cm	52 cm	11,5 kg	150 kg

*= Finns som färdig med enhandsbroms. Artikel.nr 33102 för höger och 33103 för vänster.

Tillbehör Rebel och Carl-Oskar

Ryggband Art.nr 14201	
Enhandsbroms Art.nr 15152	
Syrgashållare Art.nr 11705	
Släpbroms Art.nr 12963	
Steghjälp Underlättar att ta sig över trottoarkant etc. Art.nr 32758	
Underarmsstöd Art.nr 39317, Vänster Art.nr 39318, Höger OBS! Måste kombineras med enhandsbroms.	
Mjukgrepp Art.nr 39178, kommer som styck. Monteras av tekniker (arbetsorder).	

<p>Antistat wire till Carl-Oskar & Rebel</p> <p>Art.nr 40609</p> <p>Motverkar att patienten får stötar av rollatorn</p>	
<p>Droppställning</p> <p>Art.nr 42747</p>	
<p>Luftpumpade Hjul Carl-Oskar</p> <p>OBS! Inget som rekommenderas.</p>	<p>Betalas av brukaren (egenansvar)</p> <p><u>Kostnad</u></p> <p>1250 kr (montering) + Hjul (490*4)</p> <p>= 3210 kr</p>
<p>Korg, bricka, väska och kryckhållare</p>	<p>Betalas av brukaren (egenansvar)</p>

Futura


Leverantör www.invacare.se/sv










Utgått ur sortiment, går att förskriva i mån av tillgång.



Art.nr	Höjd handtag	Bredd	Sitshöjd	Sittbredd	Vikt	Max brukarvikt
09389 Futura 45	64-79 cm	60 cm	47,5 cm	42 cm	7,6 kg	150 kg
09388 Futura 52	71-85 cm	61 cm	54,5 cm	42 cm	7,8 kg	150 kg
09386 Futura 60	79-93 cm	61 cm	62 cm	42 cm	8 kg	150 kg
09387 Futura 68	86-101,5 cm	64 cm	70,5 cm	42 cm	8,2 kg	150 kg

Tillbehör Futura:

<p>Mjukgrepp, monteras av tekniker (arbetsorder)</p> <p>Art.nr 07708</p>	
---	--

<p>Ryggband</p> <p>Art.nr 09792</p>	
<p>Bromsförstärkare</p> <p>Art.nr 12707</p>	
<p>Enhandsbroms</p> <p>Art.nr 10004 Höger</p> <p>Art.nr 10005 Vänster</p>	
<p>Syrgashållare</p> <p>Art.nr 13985</p>	
<p>Släpbroms</p> <p>Art.nr 11541</p>	
<p>Steghjälp</p> <p>Underlättar att ta sig över trottoarkant etc.</p> <p>Art.nr 12801</p>	
<p>Droppställning</p> <p>Art.nr 36817</p>	
<p>Underarmsstöd</p> <p>Art.nr 38307, Vänster</p> <p>Art.nr 38308, Höger</p> <p>OBS! Måste kombineras med enhandsbroms.</p>	
<p>Antistathandtag</p> <p>Art.nr 32527</p> <p>Motverkar att patienten får stötar av rollatorn</p>	
<p>Korg, bricka, väska och kryckhållare</p>	<p>Betalas av brukaren (egenansvar)</p>

Futura med HP-handtag

Modell	Art.nr HP-handtag vänster sida	Art.nr HP-handtag höger sida
Futura 52	15453	15452
Futura 60	12057	12056
Futura 68	15455	15454



Futura med tvärhandsgrepp

Modell	Tvärhandsgrepp, bromsas med höger hand
Futura 60	32951
Futura 68	32953



Modell	Tvärhandsgrepp, bromsas med vänster hand
Futura 60	32950
Futura 68	32952



Futura med enhandsbroms

Modell	Art. nr broms vänster sida	Art.nr broms höger sida
Futura 52	36415	36414
Futura 60	32909	32908
Futura 68	36433	36432



Gemino 20

Lättviktsrollator

Leverantör www.sunrisemedical.se

Rollator markerad i fet stil är standardrollator.



Modeller

Art.nr	Höjd handtag	Bredd	Sitshöjd	Sittbredd	Vikt	Max brukarvikt
37723 Gemino 20, S	65-77 cm	55 cm	48 cm	42 cm	6,6 kg	125 kg
37722 Gemino 20	78-100 cm	60 cm	62 cm	47 cm	7,1 kg	150 kg
37724 Gemino 20, M	69-88 cm	60 cm	55 cm	47 cm	7 kg	130 kg

Tillbehör Gemino 20

Enhandsbroms Art.nr 37725	
Ryggband Art.nr 43147	
Droppställning	Art.nr 43230
Korg, bricka, väska och kryckhållare	Betalas av brukaren (egenansvar)

Fellow

Leverantör www.invacare.se

Utgått ur sortiment och kan endast bytas ut av tekniker om patienten haft en likadan sedan tidigare.







Finns inte dessa på lager så får patienten en Rebel eller Futura i stället.



Modeller

Art.nr	Höjd handtag	Bredd	Sitshöjd	Sittbredd	Vikt	Max brukarvikt
32769 Fellow std grå	77-95 cm	63 cm	59 cm	44 cm	8 kg	150 kg
32770 Fellow låg grå	68-80,5 cm	62 cm	50,5 cm	44 cm	7,7 kg	130 kg
32772 Fellow smal grå	77-95 cm	59,5 cm	60 cm	44 cm	8,1 kg	130 kg
32771 Fellow hög grå	82-100 cm	62,5 cm	64 cm	44 cm	8,1 kg	130 kg
32773 Fellow bred grå	77-95 cm	69 cm	60 cm	50 cm	8,7 kg	150 kg

Tillbehör Fellow

Ryggband Art.nr 32753	
Enhandsbroms Art.nr 32754 Höger Art.nr 32755 Vänster	
Syrgashållare Art.nr 10818	
Släpbroms Art.nr 34395	
Steghjälp Art.nr 32752	
Droppställning Art.nr 13441	
Korg, bricka, väska och kryckhållare	Betalas av brukaren (egenansvar)

RA-rollatorer

RA-rollator Rebel, Staffan och Carl-Oskar

Leverantör www.humancare.se



Rebel



Staffan



Carl-Oskar

RA-rollator i fet stil är standardrollator.

Art.nr	Höjd handtag	Bredd	Vikt	Max brukarvikt
41937 Rebel RA Låg*	86-104 cm	67 cm	11,3 kg	125 kg
12451 Rebel RA STD**	106-124 cm	67 cm	11,5 kg	125 kg
10663 Staffan RA Låg	86-108 cm	59 cm	10,3 kg	90 kg
10536 C-O RA 67***	107-126 cm	67 cm	13,2 kg	125 kg
35973 C-O RA 72	107-126 cm	72 cm	13,3 kg	125 kg

*= Finns som färdig med höger och vänster enhandsbroms, 33204 & 33205

**= Finns som färdig med höger och vänster enhandsbroms, 42700 & 42701

***= Finns som färdig med höger och vänster enhandsbroms, 34470 & 34471

Tillbehör:

Se tillbehör Rebel och Carl-Oskar

Övriga tillbehör	Kommentar
Armstödsrör kort 67 art.nr 32632 & armstödsrör kort 72 art.nr 32638	Sänker min och max höjden med 15 cm. OBS! kommer i styck! Passar ej till låga modeller.
Enhandsbroms artikelnummer 15153	Skriv arbetsorder för montering och vilken sidan man önskar få bromsen monterad.
Sits med Grind 67 artikelnummer 17208 & sits med grind 72 artikelnummer 41909	Kräver kontakt med konsulent

Volaris

Leverantör www.eurovema.com

Utgått ur sortiment, kan förskrivas i mån av tillgång.



Art.nr	Höjd handtag	Bredd	Sitshöjd	Sittbredd	Vikt	Max brukarvikt
37772 Volaris	88-114 cm	64 cm	46-57 cm	47 cm	11,9 kg	125 kg

Tillbehör:

Enhandsbroms, artikelnummer 38975

Alpha Basic

Leverantör www.invacare.se

Utgått ur sortiment, kan förskrivas i mån av tillgång.



Art.nr	Höjd handtag	Bredd	Sitshöjd	Sittbredd	Vikt	Max brukarvikt
2961 Alpha Basic*	104-122 cm	66 cm	62 cm	43 cm	11,3 kg	125 kg

* Finns som färdig med höger och vänster enhandsbroms, art.nr 15282 & 15281

Tillbehör:

Se tillbehör Futura

Enhandsbroms Vä Art.nr 13375

Enhandsbroms Hö Art.nr 13374

Gåbord med patientbroms

Gåbord Rebel, Staffan och Carl-Oskar

Leverantör: www.humancare.se



Rebel



Staffan



Carl-Oskar

Gåbord i fet stil är standardmodell.

Art.nr	Höjd	Bredd	Vikt	Max brukarvikt
10488 Staffan låg	86-108 cm	62 cm	11,7 kg	90 kg
41939 Rebel Låg	86-104 cm	67 cm	12,8 kg	125 kg
12450 Rebel STD	104-122 cm	67 cm	12,8 kg	125 kg
10537 C-O 67	107-126 cm	67 cm	14,7 kg	125 kg
36792 C-O 72	107-126 cm	72 cm	14,8 kg	125 kg

Tillbehör:

Se tillbehör Rebel & RA-rollator Rebel & Carl-Oskar

Alpha Basic

Leverantör: www.invacare.se

Kan förskrivas i mån av tillgång.

Art.nr	Höjd	Bredd	Vikt	Max brukarvikt
13824 Alpha basic	99-126 cm	65 cm	12,8 kg	125 kg



Tillbehör

Se tillbehör Futura & RA Alpha Basic

Gåbord Bure

Leverantör: www.directhealthcaregroup.com

Gåbord Bure el och gasfjäderhöjt samt Bure double



Bure el



Bure gasfjäderhöjt




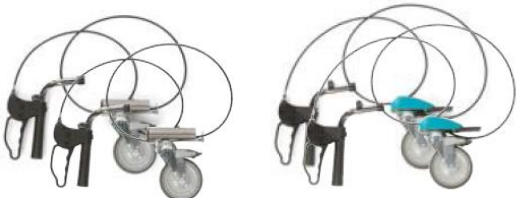




Bure Double

Modeller

Art.nr	Höjd	Bredd	Vikt	Max brukarvikt	Golv-överkant ramrör
43754 Bure El Hjul 125 mm	91-131 cm	78 cm	25 kg	150 kg	Ca 22 cm
43781 Bure El Hjul 75 mm	86-126 cm	78 cm	25 kg	150 kg	Ca 17 cm
43671 Bure el-el Hjul 125 mm	90-130 cm	70-95 cm	29 kg	150 kg	Ca 19 cm
32346 Bure gasfjäderhöjt Hjul 125 mm	91-129 cm	78 cm	19 kg	150 kg	
37224 Bure El Low Hjul 125 mm	75-100 cm	78 cm	-	150 kg	Ca 22 cm
35495 Bure El small Hjul 125 mm	91-131 cm	66 cm	24 kg	150 kg	Ca 22 cm

Tillbehör

<p>Syrgashållare</p> <p>Art.nr 18037</p>	
<p>Droppställning</p> <p>Art.nr 36406</p>	
<p>Höj och sänkreglage i handtaget</p> <p>Kontakta konsulent</p>	
<p>Handbromstillsats</p> <p>Art.nr 41035 Bure manuell/gas/el/smäl/XL</p> <p>Art.nr 38344 Bure el-el Double 2.0</p> <p>OBS! Alla tillsatser bygger 0,5-1 cm extra i sidled. Kräver specialanpassning vid montering på gåbord med höj- och sänkreglage i handtaget. Passar bara till gåbord som är tillverkade från 2016 och framåt. Kontakt med konsulent krävs.</p> <p>Följande gåbord finns färdiga med handbroms: Art.nr 34435 Bure El Art.nr 36149 Bure smal Art.nr 42346 Bure Double 2.0</p>	 <p style="text-align: center;">41035 38344</p>
<p>Ståplatta till Bure Double 2.0, (art.nr 43671)</p> <p>Svängbara hjul</p> <p>Art.nr 38274 Kort m svängbara hjul Art.nr 38276 Lång m svängbara hjul</p> <p>Raka hjul</p> <p>Art.nr 36882 Ståplatta Bure el-el (double) kort 2.0 Art.nr 36884 Ståplatta Bure el-el (double) lång 2.0</p>	
<p>Ståplatta till Övriga Bure (Ej XL eller Double)</p> <p>Raka Hjul</p> <p>Art.nr 36883 Ståplatta Bure std & Low kort Art.nr 36885 Ståplatta Bure std & Low lång</p> <p>Svängbara hjul</p> <p>Art.nr 38275 Kort m svängbara hjul Art.nr 38277 Lång m svängbara hjul</p>	

<p>Hälband till ståplatta</p> <p>Art.nr 40570</p>	
<p>Ståplatta till Bure XL</p> <p>Utgått leverantör, levereras i mån av tillgång. Art.nr 34728</p>	
<p>Gåträningsssele</p> <p>Art.nr 39749 Gåträningsssele Bure std inkl fästen Passar till: Alla utom Bure El XL</p> <p>Max Brukarvikt: 150 kg</p>	
<p>Sidostöd</p> <p>Art.nr 15578 Passar till: Alla modeller</p>	
<p>Knästöd</p> <p>Art.nr 39363</p> <p>OBS! Passar ej Bure XL</p>	
<p>Hjul</p> <p>Art.nr 37642, 75 mm Art.nr 32355, 100 mm Art.nr 18002, 125 mm (standard)</p> <p>Hjulen levereras styckvis, måste läggas som komponenter vid förskrivning, med leverans till tekniker + arbetsorder.</p>	



Bure Rise & go

Leverantör: www.directhealthcaregroup.com







Komponenter som ingår: Ståplatta artikelnr 38275 eller 38274 (double) och uppresningssele artikelnr 33860. Knästöd ingår alltid och går ej att välja bort.

Modeller

Art.nr	Höjd	Bredd	Max brukarvikt	Golv-underede
33626 Ej benspridning (Utgående)	97-137 cm	77 cm	150 kg	19 cm
41918 (double) Bure Rise & Go 2.0 75 mm hjul	89-129 cm	66-106 cm	150 kg	14,5 cm
37223 Bure Rise & Go 125 mm hjul (utgående)	90-130 cm	66-106 cm	150 kg	19,5 cm

Tillbehör

<p>Uppresningssele:</p> <p>Art.nr 33861 Storlek S, Midjemått 95-105 cm Art.nr 33860 Storlek M, Midjemått 105-120 cm Art.nr 33859 Storlek L, Midjemått 110-140 cm Art.nr 38168 Storlek XL, Midjemått 130-160 cm</p> <p>Max Brukarvikt: 150 kg</p>	
<p>Gåsele</p> <p>Art.nr 38986 Gåträningskit komplett med fästen</p> <p>Max Brukarvikt: 150 kg</p>	
<p>Sidostöd</p> <p>Art.nr 15578 Passar till: Alla modeller</p>	
<p>Syrgashållare</p> <p>Art.nr 18037</p>	

<p>Droppställning</p> <p>Art.nr 36406</p>	
<p>Ståplatta till <u>Bure Double 2.0</u> (Art.nr 37222, 37223)</p> <p>Svängbara hjul Art.nr 38274 Kort m svängbara hjul Art.nr 38276 Lång m svängbara hjul</p> <p>Raka hjul Art.nr 36882 Ståplatta Bure el-el (double) kort 2.0 Art.nr 36884 Ståplatta Bure el-el (double) lång 2.0</p>	
<p>Ståplatta till <u>Övriga Bure</u> (Ej XL eller Double)</p> <p>Raka Hjul Art.nr 36883 Ståplatta Bure std & Low kort Art.nr 36885 Ståplatta Bure std & Low lång</p> <p>Svängbara hjul Art.nr 38275 Kort m svängbara hjul Art.nr 38277 Lång m svängbara hjul</p>	
<p>Hälband till ståplatta</p> <p>Art.nr 40570</p>	
<p>Hjul</p> <p>Art.nr 37642, 75 mm Art.nr 32355, 100 mm Art.nr 18002, 125 mm (standard) Hjulen kommer som styck och måste läggas som komponenter för att bli påmonterade.</p>	
<p>Handbromstillsats</p> <p>Art.nr 41036 Handbromstillsats Bure Rise & Go (33626) Art.nr 41039 Handbromstillsats Bure Rise & Go 2.0 (37223)</p> <p>OBS! Passar bara till gåbord som är tillverkade från 2016 och framåt. Kontakt med konsulent krävs</p>	

Gånghjälpmedel för tunga brukare

Maxi plus

Leverantör: www.invacare.se



Maxi plus är vår upphandlade rollator, **ska väljas i första hand.**

Modeller

Art.nr	Höjd handtag	Bredd	Sitshöjd	Sittbredd	Vikt	Max brukarvikt
15198 Maxi + 55	72-89,5 cm	70 cm	55 cm	52 cm	9,8 kg	200 kg
15199 Maxi + 65	81-98,5 cm	70 cm	65 cm	52 cm	10,3 kg	200 kg

Tillbehör

Samma tillbehör som till Futura förutom följande:

Ryggband Art.nr 12542	
Enhandsbroms Art.nr 07703 Höger Art.nr 07901 Vänster	
Korg, bricka, väska och kryckhållare	Betalas av brukaren (egenansvar)

Rollator Carl-Oskar, förstärkt modell

Leverantör: www.humancare.se

De förstärkta modellerna av Carl-Oskar är inte upphandlade,

varför **Maxi+** ska väljas i första hand.



Modeller

Art.nr	Höjd handtag	Bredd	Sitshöjd	Sittbredd	Vikt	Max brukarvikt
17185 C-O 62 förstärkt	77-95 cm	62 cm	64 cm	42 cm	13,2 kg	275 kg
10935 C-O 67 förstärkt	77-95 cm	67 cm	64 cm	47 cm	13,3 kg	275 kg
16482 C-O 72 förstärkt	77-95 cm	72 cm	64 cm	52 cm	13,4 kg	275 kg

Tillbehör

Se tillbehör Carl-Oskar.

RA-Support

Leverantör: www.superiorsweden.com

Obs! Underarmsstöden går ej att flytta in.



Art.nr	Höjd handtag	Bredd	Sitshöjd	Sittbredd	Vikt	Max brukarvikt
39958 RA Support	100-130 cm	71 cm	50 cm	50,8 cm	17 kg	200 kg

Tillbehör

Korg egenansvar

Gåbord Bure el XL

Art.nr	Höjd handtag	Bredd	Max brukarvikt
41919 Bure El XL PU	91-131 cm	88 cm	240 kg



Tillbehör

<p>Syrgashållare</p> <p>Art.nr 18037</p>	
<p>Droppställning</p> <p>Art.nr 36406</p>	
<p>Höj och sänkreglage i handtaget</p> <p>Kontakta konsulent</p>	
<p>Handbromstillsats</p> <p>Art.nr 41035 Bure XL</p> <p>OBS! Alla tillsatser bygger 0,5-1 cm extra i sidled. Kräver specialanpassning vid montering på gåbord med höj- och sänkreglage i handtaget. Passar bara till gåbord som är tillverkade från 2016 och framåt. Kontakt med konsulent krävs.</p>	
<p>Ståplatta till Bure XL</p> <p>Utgått leverantör, kan beställas i mån av tillgång</p> <p>Art.nr 34728</p>	
<p>Sidostöd</p> <p>Art.nr 15578</p>	
<p>Hjul</p> <p>Art.nr 37642, 75 mm Art.nr 32355, 100 mm Art.nr 18002, 125 mm (standard)</p> <p>Hjulen levereras styckewis, måste läggas som komponenter vid förskrivning, med leverans till tekniker + arbetsorder.</p>	

Kryckkäpp

Leverantör: www.superiorswden.se

Nya gummifötter går att få från HMC

Art.nr	Höjd	Max brukarvikt
34670 Kryckkäpp Superior vänster	68-110 cm	325 kg
34669 Kryckkäpp Superior höger	-"-	-"-



Fyrpunktsstöd

Art.nr	Höjd	Vikt	Max brukarvikt
39601	71-93 cm	0,9 kg	270 kg



Betastöd

Art.nr	Höjd	Bredd		Vikt	Max brukarvikt
33886	76-101 cm	71 cm	-	3 kg	270 kg



Gåstol

Meywalk 2000

Leverantör: www.maydayaid.se

Standardutrustning: antitippstöd, uppåtböjd bålstödsring, fjädrar, sadel och rumpstopp.








Modell

Art.nr	Bålstöds Höjd	Bålomkrets	Längd	Bredd	Sitthöjd	Vikt	Max brukarvikt
33213 Stl S, Grön	77-96 cm	70-105 cm	85 cm	68 cm	44-62 cm	22 kg	100 kg
11463 Stl M, Blå	90-113 cm	70-130 cm	95 cm	68 cm	58-82 cm	25 kg	100 kg
11462 Stl L, blå	102-125 cm	70-130 cm	95 cm	68 cm	70-94 cm	26 kg	100 kg

Tillbehör

<p>Bålstödsring</p> <p>Art.nr 14540 Bålstödsring 70cm Rak Stl S Art.nr 14539 Bålstödsring 70cm Uppåtböjd Stl S Art.nr 14542 Bålstödsring 90cm Rak Stl S,M,L Art.nr 14541 Bålstödsring 90cm Uppåtböjd Stl S,M,L Art.nr 14544 Bålstödsring 105cm Rak Stl S,M,L Art.nr 14543 Bålstödsring 105cm Uppåtböjd Stl S,M,L Art.nr 14546 Bålstödsring 120cm Rak Stl M,L Art.nr 14545 Bålstödsring 120cm Uppåtböjd Stl M,L</p> <p>OBS! Måste kompletteras med sidovingar.</p>	 <p>Uppåtböjd</p>  <p>Rak</p>
<p>Sidovingar</p> <p>Art.nr 33958 Sidovingar 70 ring Meywalk S Art.nr 33959 Sidovingar 90 ring Meywalk S Art.nr 33960 Sidovingar 105 ring Meywalk S Art.nr 15638 Sidovingar 90 ring Meywalk M Art.nr 15640 Sidovingar 105 ring Meywalk M Art.nr 15642 Sidovingar 120 ring Meywalk M Art.nr 15639 Sidovingar 90 ring Meywalk L Art.nr 15641 Sidovingar 105 ring Meywalk L Art.nr 15643 Sidovingar 120 ring Meywalk L</p>	<p>Bild finns ej</p>

<p>Fjädrar</p> <p>Art.nr 14547 Fjädrar vita för 20-45 kg Art.nr 14548 Fjädrar gula för 20-65 KG Art.nr 14549 Fjädrar blå för 65-80 KG Art.nr 14550 Fjädrar röda för 80-100 KG Art.nr 34320 Fjädrar grå för 100-130kg</p>	
<p>Antitippstöd</p> <p>Art.nr 12156 Antitippstöd Meywalk 2000, S,M, L</p>	
<p>Fotskyddsskenor</p> <p>Art.nr 33214 Fotskyddsskenor Stl S Art.nr 13968 Fotskyddsskenor Stl M & L</p>	 <p style="text-align: center;">Art.nr 33214 Art.nr 13968</p>
<p>Sadel</p> <p>Art.nr 17739 Limpsadel Art.nr 38358 Minisadel Art.nr 41142 Sadel Meywalk 2000 standard stl S med fäste Art.nr 37233 Sadel Meywalk 2000 standard stl M & L med fäste</p>	 <p style="text-align: center;">Limpsadel Minisadel</p> <p style="text-align: center;">Standardsattel</p>
<p>Överdrag</p> <p>Art.nr 35537 Överdrag till bålstödsring uppåtböjd 70cm Art.nr 35538 Överdrag till bålstödsring uppåtböjd 90cm Art.nr 35539 Överdrag till bålstödsring uppåtböjd 105cm Art.nr 35540 Överdrag till bålstödsring uppåtböjd 120cm Art.nr 35541 Överdrag till bålstödsring uppåtböjd 130cm</p>	

Meywalk MK4

Leverantör: www.maydayaid.se

Standardutrustning: antitippstöd, bålstödsring, fjädrar, sadel, rumpstopp, riktningsspärr, parkeringsbroms, släpbroms och bakåtspärr.




Modell

Art.nr	Bålstöds höjd m. belastning	Bålomkrets	Längd	Bredd	Sitthöjd m. belastning	Vikt	Max brukarvikt
34304 Stl M, röd	98-131 cm	70-130 cm	86 cm	62 cm	60-85 cm	32 kg	130 kg
34305 Stl L, svart	118-151 cm	70-130 cm	96 cm	66 cm	78,5-103 cm	34 kg	130 kg

Tillbehör

Bålstödsring Art.nr 34306 Bålstödsring 70cm Art.nr 34307 Bålstödsring 90cm Art.nr 34308 Bålstödsring 105cm Art.nr 34309 Bålstödsring 120cm Art.nr 34310 Bålstödsring 130cm	
Fjädrar Art.nr 14547 Fjädrar vita för 20-45 kg Art.nr 14548 Fjädrar gula för 20-65 kg Art.nr 14549 Fjädrar blå för 65-80 kg Art.nr 14550 Fjädrar röda för 80-100 kg Art.nr 34320 Fjädrar grå för 100-130 kg	
Fotskyddsskenor Art.nr 34311 Fotskyddsskenor medium MK4 Art.nr 34312 Fotskyddsskenor large MK4	
Bendelare Art.nr 34313 Bendelare Meywalk MK4	
Sadel Art.nr 34314 Limpsadel Art.nr 40865 Sadel mellan Art.nr 37604 Sadel stor	

Art.nr 38358 Minisadel	 Sadel mellan
Sadelöverdrag Gel Art.nr 41876 Överdrag Stl S & mini Art.nr 41874 Överdrag Stl M Art.nr 41875 Överdrag Stl L	  Överdrag mellan Överdrag mini
Antitippstöd Art.nr 34315 Antitippstöd Medium Art.nr 34316 Antitippstöd Large	

Dynamic Pacer

Leverantör: www.minicrosser.se

Förskrivning sker tillsammans med konsulent.

Standardutrustning: 140 mm länkhjul med parkeringsbroms, släpbroms, backspärr och riktningsspärr.


För användning inom- och begränsad utomhusmiljö (plant underlag).



Modell

Art.nr	Armbågshöjd	Ramhöjd	Längd	Bredd	Vikt	Max brukarvikt
Stl M	61-89 cm	55-69 cm	76 cm	66 cm	12 kg	68 kg
Stl L	81-119 cm	72-98 cm	91 cm	71 cm	13 kg	91 kg
Stl XL	86-124 cm	79-104 cm	101 cm	80 cm	17 kg	113 kg

Tillbehör

Sadelsits Har följande justeringsmån: Sadeldjup: 13 cm Sadelvinkel: Framåt 7,5° och 15° Bakåt 7,5° och 15° Sadelhöjd: 22 cm	
--	--

<p>Slingsadel</p> <p>Stl Small</p> <p>Stl Large</p> <p>Dyna stl S & L</p>	
<p>Bröststöd</p> <p>Stl S omkrets 36-71, höjd 11 cm</p> <p>Stl M omkrets 56-102 cm, höjd 17 cm</p> <p>Stl L omkrets 71-127 cm, höjd 20 cm</p> <p>Justeringsmån i höjd. 12,5 cm</p>	
<p>Underarmsstöd</p> <p>Utan handtag</p> <p>Med handtag</p>	
<p>Handtag Vinkelställbara</p> <p>Passar M, L & XL</p>	

VÅRDBÄLTEN


Leverantör: www.directhealthcaregroup.com

Modeller

Finns i fyra varianter, alla med handtag i vertikal och i horisontell riktning. Max brukarvikt 170 kg.

Flexibelt, Hug


Rörliga, horisontella handtag som glider fritt i öglor och som gör att bältet ”kramar om” brukaren i stället för att glida upp under olika förflyttningssituationer.

Leverantör:	Direct Healthcare Group	
Övrigt:	Sammetsklädd insida	

Modell	Flexibelt, Hug stl S	Flexibelt, Hug stl M	Flexibelt, Hug stl L	Flexibelt, Hug stl XL
Art.nr	43625	43626	43627	43628
Antal handtag	7 st	9 st	11 st	13 st
Omkrets	45-70cm	60-100cm	70-120cm	100-160cm

Easybelt, Hug


Rörliga, horisontella handtag som glider fritt i öglor och som gör att bältet "kramar om" brukaren i stället för att glida upp under olika förflyttningssituationer.

Leverantör:	Direct Healthcare Group	
Övrigt:	Avtorkningsbar insida	

Modell	Easybelt, Hug stl XS	Easybelt, Hug stl S	Easybelt, Hug stl M	Easybelt, Hug stl L
Art.nr	43629	43630	43631	43632
Antal handtag	5 st	7 st	9 st	11 st
Omkrets	45-70cm	60-100cm	70-120cm	100-160cm

EasyBelt

Utgående artikel, kan beställas i mån av tillgång.

Leverantör:	Direct Healthcare Group	
Övrigt:	Avtorkningsbar insida	


Modeller

Modell	EasyBelt stl XS	FlexiBelt stl S	FlexiBelt stl M	FlexiBelt stl L
Art.nr	11037	02694	02695	02696
Antal handtag	5 st	7 st	9 st	11 st
Omkrets	45-70cm	60-100cm	70-120cm	100-160cm

FlexiBelt

Utgående artikel, kan beställas i mån av tillgång.

Sammetsklädd insida.

Leverantör	Direct health care group	
Övrigt:	Sammetsklädd insida	

Modeller

	FlexiBelt stl S	FlexiBelt stl M	FlexiBelt stl L	FlexiBelt stl XL
Artikelnr	11708	09889	11709	11707
Omkrets	60-100 cm	70-120 cm	100-160 cm	115-175 cm
Antal handtag	7 st	9 st	11 st	13 st

HÖFTSKYDDSBYXOR

Leverantör: www.nordicare.se

Försäljningshjälpmedel. Max två par byxor kan förskrivas/gång.

SafeHip airX Unisex

Unisexmodell med insydda mjuka skydd.

Modeller

Stl	Artikelnr	Höftmått (cm)
XS	32251	65-85
S	32252	75-95
M	32253	90-110
L	32254	100-120
XL	32219	110-140
XXL	32220	120-150



SafeHip AirX open

Öppen gren och insydda mjuka skydd. Används i kombination med inkontinensbyxa/inkontinensskydd eller vanliga underbyxor. SafeHip open används direkt mot kroppen och inkontinensbyxan/underbyxan tas på ovanpå.

Modeller

Stl	Artikelnr	Höftmått (cm)
XS	32255	65-85
S	32256	75-95
M	32257	90-110
L	32258	100-120
XL	32212	110-140
XXL	32213	120-150



SafeHip Active

Höftskydd med kardborrelåsning mitt fram.

Active användes med fördel utanpå kläderna men kan även bäras närmast kroppen.

Stl	Artikelnr	Höftmått (cm)
S	32214	85-95
M	32215	95-105
L	32216	105-115
XL	32217	115-125
XXL	32218	125-140



HJÄLMAR

Leverantör: www.salubrious.se

Försäljningshjälpmedel. Två hjälmar kan förskrivas/brukare.

Mjuk Hjelm Ribcap

Skyddar huvudet mot lätta slag, skrubbsår och kyla. Levereras med självutlösande spänne.

Modeller

Skyddskeps Baseball

Stl	Artikelnr	Inre Omkrets	Färg
Midi/Maxi	41557	50-55 cm	Marin
Midi/Maxi	44421	50-55 cm	Röd
S-M	41288	53-58 cm	Röd
S-M	41205	53-58 cm	Marin
L-XL	41305	59-65 cm	Röd
L-XL	41556	59-65 cm	Marin

Midi/Maxi



Skyddsmössa Lenny Antracit

Stl	Artikelnr	Inre Omkrets
Mini Kids	41580	47-49 cm
Midi Kids	41579	50-52 cm
Maxi Kids	41562	53-55 cm
S	41564	53-55 cm
M	41563	56-58 cm
L	41561	59-61 cm
XL	41565	62-65 cm



Skyddshjälm Hardy

Stl	Artikelnr	Inre Omkrets	Färg
S	41560	53-55 cm	Marine
S	44420	53-55	Platinum
M	41559	56-58 cm	Marine
M	44419	56-58 cm	Platinum
L	41558	59-61 cm	Marine
L	44418	59-61	Platinum



Skyddshjälm Kate

För att kombinera skydd och komfort vid vila/sömn. Stretchig resår i stället för hakband.

Stl	Artikelnr	Inre Omkrets	Färg
S	44440	53-55 cm	Svart
S	44441	53-55	Svart
M	44442	56-58 cm	Svart



Hård hjälm Hea

Leverantör: www.heamedical.se

Hjälmen kan användas av personer

- * Med osäker gång, som lätt faller; de med epilepsi
- * Som är självdestruktiva
- * Som skallopererats







Om patientens huvudomfång ligger mellan 2 storlekar så välj den större modellen och fyll ut med anpassningsdynor.

Modeller

Stl	Artikelnr	Inre Omkrets
XS	16898	50 cm
S	16899	53 cm
M	16900	56 cm
L	16901	58 cm
XL	16902	64 cm

Tillbehör Hård hjälm Hea

Dyna för Hjässan Artikelnr 16905 Fästs med dubbelhäftande tejp (ingår ej).	
Inläggsband Artikelnr 16903 Har tejp med avtagbart skyddspapper på baksidan.	
Dynor Ovala 4st/sats Artikelnr 16904 Har tejp med avtagbart skyddspapper på baksidan.	
Säkerhetsspänne quick-release Artikelnr 41904, beställs samtidigt som hjälmen	

--	--

ÖVRIGA GÅNGHJÄLPMEDEL

Fyrapunktsstöd

Leverantör: www.karopharma.se & www.superiorsweden.se

Nya doppskor går att få från HMC.

Modeller

Art.nr	Höjd	Vikt	Max brukarvikt
03636 Vuxen	77-97 cm	1,1 kg	120 kg
06537 Junior	63-74 cm	1,0 kg	120 kg
10447 Barn	48,5-58,5 cm	0,7 kg	50 kg



Betastöd

Leverantör: www.karopharma.se

Nya doppskor går att få från HMC.

Modeller

Art.nr	Höjd	Bred	Djup	Vikt	Max brukarvikt
00123 Vuxen	85-97 cm	60 cm	48 cm	1,7 kg	120 kg
00124 Junior	73-85 cm	60 cm	51 cm	1,6 kg	120 kg
38366 Barn	60-72 cm	51 cm	47 cm	1,5 kg	70 kg



Axillarkryckor

Leverantör: www.sanicare.se

Nya doppskor går att få från HMC.

Art.nr & storlek	Höjd	Max brukarvikt
40552, Stl M	133-153 cm	120 kg

Leverantör: www.karopharma.se

Nya doppskor går att få från HMC

Art.nr & storlek	Höjd	Max brukarvikt
41046	112-132 cm	130 kg

RA-kryckor

Leverantör: www.karopharma.se

Nya doppskor går att få från HMC.

Art.nr	Höjd	Max brukarvikt
00109	95-118 cm	130 kg

