

Lyftar och lyftselar



Kursansvarig hjälpmedelskonsulent

Eva Scharin, telefon: 021-17 58 57

E-post: eva.scharin@regionvastmanland.se

Björn Flennersjö, telefon: 070-2570022

E-post: bjorn.flennersjo@regionvastmanland.se

Innehållsförteckning

artikelansvar	3
Styr betalningsansvaret för hjälpmedel	3
Utdrag från Hjälpmedelshandboken	4
12 36 Personlyftar	4
12 36 03 Hjullyftar för överflyttning av en sittande person med hjälp av lyftselar/lyftslingor	4
12 36 04 Hjullyftar för överflyttning av en stående person	4
12 36 12 Stationära personlyftar	4
12 36 21 Lyftselar, sitsar och bårar	4
Stålyftar (uppresningslyftar)	5
Sabina Stålyft	5
Stålyft Minilift 160 EE	6
Golvlyftar	7
Golvlyft GL5. 1	7
Golvlyft GL5 2.0	8
Golvlyft UNO 102 EE	8
Golvlyft GLHD	9
Taklyftar	10
GH3	
Lyftselar	11
Att tänka på när man väljer lyftsele:	11
Lyftbygelns bredd:	12
Lyftselar	13
Basselar	13
Lyftselar med låg rygg	13
Lyftselar med axelhög rygg	14
Lyftselar med hög rygg	16
Hygienselar	18
Hygienselar med extra stöd	19
Amputationsselar	19
Hel sele	20
Skelsele	21
Lyftvästar	21
Tillbehör till lyftvästar	22
Lyftbyxa	22
Övriga tillbehör	23

ARTIKELANSVAR

Styr betalningsansvaret för hjälpmedel

Artikelansvar (tidigare kallat nivåindelning):	
Ansvar 1	Regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel är hjälpmedel som är komplexa och kostsamma till exempel eldrivna rullstolar, kommunikationssystem samt tillbehör till dessa.
Ansvar 2	Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel på hjälpmedel är manuella rullstolar och rollatorer.
Ansvar 3	Rekvisitionshjälpmedel. Enklare hjälpmedel som inte förskrivs via Hjälpmedelscentrum. Beställs till enheten, oftast i större antal. Hjälpmedlen är försäljningshjälpmedel. Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Hjälpmedel som används i hemsjukvård betalas av Region Västmanland. Exempel på hjälpmedel är badbräda, griptång och sängklossar.
Ansvar 4	Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Kommunen har betalningsansvar för patienter som bor i särskilda boendeformer men beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel på hjälpmedlen är omvårdnadshjälpmedel som personlyftar, dusch- och toalettstolar på hjul och reglerbara sängar.

12 36 Personlyftar

12 36 03 Hjullyftar för överflyttning av en sittande person med hjälp av lyftselar/lyftslingor

Förskrivare: Arbetsterapeut och Sjukgymnast/Fysioterapeut

Nivå: 4

Utprovning: Elektrisk hjullyft är standard.

12 36 04 Hjullyftar för överflyttning av en stående person

Förskrivare: Arbetsterapeut och Sjukgymnast/Fysioterapeut

Nivå: 4

Utprovning: Uppresningslyft används enbart tillsammans med leverantörens egna lyftselar.

Uppresningslyft är lämplig till patient med viss tonus i benen.

12 36 12 Stationära personlyftar

Taklyftar

Förskrivare: Arbetsterapeut och Sjukgymnast/Fysioterapeut

Nivå: 4

Kriterier: Förskrivning av taklyft ska alltid föregås av att förflyttningssituationen kartläggs av förskrivaren. Detta innebär att mobil personlyft och/eller andra överflyttningstekniker först ska ha provats och av förskrivaren bedömts som otillräckliga eller olämpliga, utifrån patientens medicinska status och totala omvårdnadsbehov. Förskrivning av taklyft förutsätter ett långsiktigt behov och kvarboende under överskådlig tid. Något/några av följande kriterier ska vara uppfyllt.

- Utrymmesskäl, svängradie eller uppställningsyta för mobil lyft saknas.
- Patient med smärta/rädsla.
- Patient med hög personvikt.
- Svårighet att positionera patient i rullstol.
- Ensamarbetande vårdare/assistent.
- Patient som gör självständig förflyttning.

Information: Taklyft med rak skena eller travers ingår i grundsortiment. Övriga skensystem, ex. rum till rum-lösningar, kurvor och växlar, samt fler än två taklyftar i samma bostad beviljas i särskilda fall.

Utprovning: I samråd med hjälpmedelskonsulent.

Återställning: se Hjälpmedelsverksamhetens Allmänna del bok 1, avsnitt 6.9 "Montering och demontering".

12 36 21 Lyftselar, sitsar och bårar

Förskrivare: Arbetsterapeut och Sjukgymnast/Fysioterapeut


Nivå: 4

Utprovning: Samtliga Hjälpmedelscentrums lyftselar går att använda till hjullyftarna och taklyftarna i sortimentet, i enlighet med gällande kombinationsavtal. Till uppresningslyftarna får endast leverantörens egna lyftselar användas.




STÅLYFTAR (UPPRESNINGSLYFTAR)




Sabina Stålyft

S-13273

Leverantör:	Liko AB	
Lager:	Köps inte in, kan enbart förskrivas vid tillgång på lagret.	
Max brukarvikt:	200 kg	
Funktion	Används för lyft från sittande till sittande. Brukaren bör kunna stödja sig på sina ben till viss del.	
Ingående komponenter:	Standardbygel (S-13274) ingår vid förskrivning.	
Övrigt:	Sabina kan, i nödfall, även användas som en traditionell personlyft, för hängande lyft.	


Tillbehör Sabina:

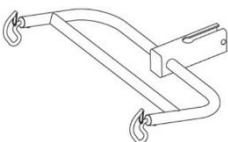Lyftsele Standard S-12126 stl S S-12125 stl M S-12124 stl L S-12123 stl XL	Västbredd (inner-/yttermått) 80 / 130 cm 90 / 140 cm 105 / 155 cm 120 / 160 cm	Personvikt < 60 kg 50-80 kg 70-100 kg > 100 kg	
Används med standardbygel (S-13274).			
Lyftsele Trygg S-12181 stl M S-12182 stl L	Västbredd 90 cm 105 cm	Personvikt < 80 kg > 70 kg	
Används med standardbygel (S-13274).			
Lyftsele Comfort S-14977 stl S S-12183 stl M S-12184 stl L S-14978 stl XL	Västbredd 80 cm 80 cm 105 cm 120 cm	Personvikt < 60 kg 50-80 kg 70-100 kg >100 kg	
OBS! Används enbart i kombination med Comfortbygel (S-12193) Rekommenderas då belastning på axeller/armhålor behöver undvikas, till exempel på patienter med halvsidig förlamning eller ledproblematik.			



Byglar S-12193 Comfortbygel S-13275 Stussbandsbygel	 <p style="text-align: center;">S-12193</p>  <p style="text-align: center;">S-13275</p>
Stussband S-13276	

Stålyft Minilift 160 EE

S-41898

Leverantör:	Direct Healthcare Group (f d Handicare)	
Lager:	Upphandlad fr o m 1 febr 2021. Förskrivs enbart om Sabina stålyft först provats.	
Max brukarvikt:	160 kg	
Funktion	Används för lyft från sittande till sittande. Brukaren bör kunna stödja sig på sina ben till viss del.	
Ingående komponenter:	Vadband S-41992	

Tillbehör Minilift:

Lyftsele Thorax Sling	Västbredd	Rek. Brukarvikt	
S-42199 stl S	94 cm	30-60 kg	
S-42200 stl M	104 cm	50-80 kg	
S-42201 stl L	124 cm	70-110 kg	
S-42202 stl XL	146 cm	100-150 kg	
Lyftsele Thorax Sling med sätesstöd	Västbredd	Rek. brukarvikt	
S-42203 stl S	94 cm	30-60 kg	
S-41899 stl M	104 cm	50-80 kg	
S-41993 stl L	124 cm	70-110 kg	
S-42204 stl XL	146 cm	100-150 kg	

GOLVLYFTAR

Golvlyft GL5. 1 och GL5.2


S-41014 och S-42844

Leverantör:	Guldmann AB	
Lager:	Lagervara	
Max brukarvikt:	205 kg	
Funktion	Elektrisk höj-sänkning och brenspridning. Snabbkoppling, för enkelt byte av lyftbygel.	
Komponenter:	S- Lyftbygel 44 cm (ingår som standard). S-37491 Lyftbygel 53 cm S-37489 Lyftbygel 34 cm	
Övrigt:	Underrede höjd 11,5 cm, bredd min 69,5 cm, max 137,2 cm. Lyfthöjd min 45,6 cm max 175,9 cm	

OBS! Sätts på laddning direkt efter leverans till patient. Fulladdat batteri efter ca 4 timmar.


Golvlyft GL5 2.0

S-37860

Leverantör:	Guldmann AB	
Lager:	Utgången, kan enbart förskrivas vid tillgång på lagret.	
Max brukarvikt:	205 kg	
Funktion	Elektrisk höj-sänkning och benspridning. Snabbkoppling, för enkelt byte av lyftbygel.	
Komponenter:	S-37490 Lyftbygel 44 cm (ingår som standard). S-37491 Lyftbygel 53 cm S-37489 Lyftbygel 34 cm	
Övrigt:	Underrede höjd 11,5 cm, bredd min 69,5 cm, max 137,2 cm. Lyfthöjd min 45,6 cm max 175,9 cm	


Golvlyft UNO 102 EE

S-11620

Leverantör:	Liko AB	
Lager:	Utgången, kan enbart förskrivas vid tillgång på lagret.	
Max brukarvikt:	175 kg	
Funktion	Elektrisk höj-sänkning och benspridning. Snabbkoppling, för enkelt byte av lyftbygel.	
Komponenter:	S-18655 Lyftbygel 45 cm (ingår som standard). S-18654 Lyftbygel 35 cm S-32501 Lyftbygel twin 67 cm (till större personer)	

Golvlyft GLHD


S-15342

Leverantör:	Guldmann AB	
Lager:	Utgången, kan enbart förskrivas vid tillgång på lagret.	
Max brukarvikt:	200 kg	
Funktion	Har elektrisk höjning och benspridning, samt är försedd med snabbkoppling, för enkelt byte av lyftbygel.	
Ingående komponenter:	S-nr 15343 Lyftbygel 53 cm (ingår som standard). S-15344 Lyftbygel 40 cm S-15411 Lyftbygel 30 cm	

TAKLYFTAR

GH3

Förskrivs i samråd med hjälpmedelskonsulent

Leverantör:	Guldmann AB	
Lager:	Lagervara	
Max brukarvikt:	200 kg	
Funktion	<p>Taklyft väljs med fördel till trånga utrymmen, då man önskar ett tryggt, säkert och smärtfritt lyft. Det är också en lösning man gärna väljer då ett långsiktigt behov av lyft föreligger.</p> <p>Taklyftar underlättar för vårdaren, speciellt vid ensamarbete runt brukaren. En taklyft kan även underlätta för brukare som gör sina förflyttningar självständigt, utan personal, då i kombination med t.ex. lyftväst.</p>	

LYFTSELAR

Guldmann är huvudleverantör av basselar, hygienselar och amputationselar från och med februari 2021.

Handicares lyftselar är inte upphandlade längre, men kan förskrivas vid tillgång på lager.

Observera att storlekarna kan skilja sig åt mellan olika leverantörer. Guldmanns lyftselar är till exempel generellt sett något mindre i storlek än Handicares.

Specielselar från olika leverantörer ingår också i sortimentet.

Att tänka på när man väljer lyftsele:

Lyftselar finns i många olika varianter. Det är alltid patientens fysiska förutsättningar som avgör vilken modell som kan användas. Frågorna nedan kan ge vägledning.

1. Hur hög ska selens ryggdel vara?

Ju lägre tonus patienten har, desto mer stöd och högre modell av lyftsele behövs. Om stöttning av huvudet krävs, väljs en hög modell eller en axelhög modell i kombination med huvudstöd som tillbehör. Patienter som kan hålla huvudet, men i övrigt har relativt låg tonus, kan använda axelhög modell. Till patienter med god tonus väljs med fördel en låg lyftsele.

Lyftselar avsedda för hygiensituationer, så som hygienselar eller toalettselar, kan enbart användas av patienter med god tonus i överkropp och höftparti, då selen har låg rygg och stor skärning mellan bendelarna och därmed ger mindre stöd.

2. Hur stor kan bendelarnas skärning vara?

Utrymmet mellan lyftselens bendelar kallas skärning. När bendelarna appliceras och korsas, bildas ett hål under patientens stuss. Är hålet för stort finns risk för urglidningsolyckor. Alla bas-selar har normalstor skärning, men hålet blir förstås olika stort beroende på selens storlek.

Hygien/toalettselar har stor skärning, för åtkomlighet vid hygiensituation.

Amputationselar har snäv skärning och bendelarna läggs omlott istället för att korsas. Hålet under stussen blir då mycket litet, vilket förebygger urglidningsrisk hos amputerade personer. Amputationselar kan även användas till icke amputerade, då man önskar ett mindre hål. Bendelarna korsas då på vanligt sätt.

3. Vilken storlek ska lyftselen ha?


Det är viktigt att lyftselen har rätt storlek. I bruksanvisningen till varje lyftsele samt på tillverkarnas hemsida, finns storleksguider att använda som riktlinje.

För stor lyftsele



Med en för stor lyftsele hänger stjärten ner och brukaren riskerar att glida ur.

För liten lyftsele

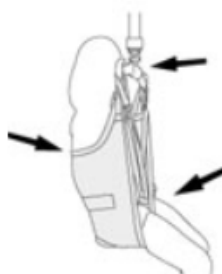

En för liten storlek kan medföra att benstöden skär in i grenen och ger obehag, att lyftbygeln kommer för nära ansiktet och/eller att ryggen ger för lågt stöd.

Rätt storlek



Rätt! Lyftselen nedkant ligger vid svanskotan. Benstöden ligger bra under benen.

4. Vilket material ska selen vara i?

Det finns två material att välja på; nylon/polyester och nät. Nätmaterial är luftigare och mer lämpligt att sitta länge på. Nylon/polyester är glattare och något lättare att applicera, men bör inte lämnas kvar under patienten någon längre stund, då det blir tätt och varmt.

Lyftbygeln bredd:

Bredden på lyftbygeln påverkar också hur lyftet blir. En för smal lyftbygel klämmer ihop patienten i selen. En för bred lyftbygel drar ut lyftselen åt sidorna och försämrar därmed stödet som selen ger.

Man ska eftersträva att lyftselen bandöglor hänger helt lodräta från lyftselen kroker.


Breda byglar: Väljs till större patienter och höga lyftselar.


Smala byglar: Väljs till smala patienter och låga lyftselar.


LYFTSELAR


Basselar

Lyftselar med låg rygg


Guldmann	Lyftsele Basic låg nylon			
Material: Nylon	Max brukarvikt	Stussmått	Rygghöjd	
S-15381, Stl XS S-15383, Stl S S-15384, Stl M S-15385, Stl L S-15382, Stl XL S-15380, Stl XXL	255 kg på samtliga storlekar	33-37 cm 36-40 cm 39-43 cm 42-45 cm 45-49 cm 48-52 cm	75-82 cm 80-87 cm 85-92 cm 90-97 cm 95-102 cm 95-102 cm	
Lyftsele basmodell för brukare med bålstabilitet, som vill ha armarna på utsidan.				


Guldmann	Lyftsele Basic låg nät			
Material: Nät	Max brukarvikt	Stussmått	Rygghöjd	
S-15387, Stl XS S-15389, Stl S S-15390, Stl M S-15391, Stl L S-15388, Stl XL S-15386, Stl XXL	255 kg på samtliga storlekar	33-37 cm 36-40 cm 39-43 cm 42-45 cm 45-49 cm 48-52 cm	75-82 cm 80-87 cm 85-92 cm 90-97 cm 95-102 cm 95-102 cm	
Lyftsele basmodell för brukare med bålstabilitet, som vill ha armarna på utsidan.				


Handicare	Lyftsele låg (Low back) nylon			
OBS! Utgången modell, kan enbart förskrivas vid tillgång på lager.				
Material: Nylon	Rek. Brukarvikt	Stussmått	Rygghöjd	
S-35015, Stl XS S-35016, Stl S S-35017, Stl M S-35018, Stl L S-35019, Stl XL S-35690, Stl XXL	20-35 kg 30-50 kg 45-80 kg 75-110 kg 100-140 kg 130-190 kg	27 cm 37 cm 47 cm 57 cm 67 cm 77 cm	60 cm 77 cm 85 cm 90 cm 92 cm 92 cm	
Lyftsele basmodell för brukare med bålstabilitet, som vill ha armarna på utsidan.				


Handicare	Lyftsele låg (Low back) nät			
	OBS! Utgången modell, kan enbart förskrivas vid tillgång på lager.			
Material: Nät	Rek. Brukarvikt	Stussmått	Rygghöjd	
S-35020, Stl XS	20-35 kg	27 cm	60 cm	
S-35021, Stl S	30-50 kg	37 cm	77 cm	
S-35022, Stl M	45-80 kg	47 cm	85 cm	
S-35023, Stl L	75-110 kg	57 cm	90 cm	
S-35024, Stl XL	100-140 kg	67 cm	92 cm	
S-35691, Stl XXL	130-190 kg	77 cm	92 cm	
Lyftsele basmodell för brukare med bålstabilitet, som vill ha armarna på utsidan.				

Lyftselar med axelhög rygg


Guldmann	Lyftsele Basic mellan nylon			
Material: Nylon	Max brukarvikt	Stussmått	Rygghöjd	
S-15364, Stl XS	255 kg på samtliga storlekar	33-37 cm	75-82 cm	
S-15366, Stl S		36-40 cm	80-87 cm	
S-15367, Stl M		39-43 cm	85-92 cm	
S-15368, Stl L		42-45 cm	90-97 cm	
S-15365, Stl XL		45-49 cm	95-102 cm	
S-15363, Stl XXL		48-52 cm	95-102 cm	
Mellanhög lyftsele för brukare som klarar att hålla huvudet men behöver stöd runt axlar och skuldror.				


Guldmann	Lyftsele Basic mellan nät			
Material: Nät	Max brukarvikt	Stussmått	Rygghöjd	
S-15373, Stl XS	255 kg på samtliga storlekar	33-37 cm	75-82 cm	
S-15349, Stl S		36-40 cm	80-87 cm	
S-15375, Stl M		39-43 cm	85-92 cm	
S-15376, Stl L		42-45 cm	90-97 cm	
S-15374, Stl XL		45-49 cm	95-102 cm	
S-15372, Stl XXL		48-52 cm	95-102 cm	
Mellanhög lyftsele för brukare som klarar att hålla huvudet men behöver stöd runt axlar och skuldror.				


Handicare	Lyftsele mellan (Basic) nät OBS! Utgången modell, kan enbart förskrivas vid tillgång på lager.			
Material: Nät	Rek. brukarvikt	Stussmått	Rygghöjd	
S-35030, Stl XS	20-35 kg	27 cm	65 cm	
S-35031, Stl S	35-55 kg	37 cm	77 cm	
S-35032, Stl M	45-80 kg	50 cm	89 cm	
S-35033, Stl L	75-110 kg	60 cm	95 cm	
S-35034, Stl XL	100-150 kg	65 cm	98 cm	
S-35545, Stl XXL	140-200 kg	75 cm	98 cm	
Mellanhög lyftsele för brukare som klarar att hålla huvudet men behöver stöd runt axlar och skuldror.				


Handicare	Lyftsele mellan (Basic) nylon OBS! Utgången modell, kan enbart förskrivas vid tillgång på lager.			
Material: Nylon	Rek. Brukarvikt	Stussmått	Rygghöjd	
S-35025, Stl XS	20-35 kg	27 cm	65 cm	
S-35026, Stl S	35-55 kg	37 cm	77 cm	
S-35027, Stl M	45-80 kg	50 cm	89 cm	
S-35028, Stl L	75-110 kg	60 cm	95 cm	
S-35029, Stl XL	100-150 kg	65 cm	98 cm	
S-35692, Stl XXL	140-200 kg	75 cm	98 cm	
Mellanhög lyftsele för brukare som klarar att hålla huvudet men behöver stöd runt axlar och skuldror.				

Lyftselar med hög rygg


Guldmann		Lyftsele Basic hög nylon		
Material: Nylon	Max brukarvikt	Stussmått	Rygghöjd	
S-15394, Stl XS S-15396, Stl S S-15397, Stl M S-15398, Stl L S-15395, Stl XL S-15393, Stl XXL	255 kg på samtliga storlekar	33-37 cm 36-40 cm 39-43 cm 42-45 cm 45-49 cm 48-52 cm	75-82 cm 80-87 cm 85-92 cm 90-97 cm 95-102 cm 95-102 cm	
Lyftsele för brukare med låg tonus och som behöver stöd bakom huvudet.				


Guldmann		Lyftsele Basic hög nät		
Material: Nät	Max brukarvikt	Stussmått	Rygghöjd	
S-15401, Stl XS S-15403, Stl S S-15404, Stl M S-15405, Stl L S-15402, Stl XL S-15400, Stl XXL	255 kg på samtliga storlekar	33-37 cm 36-40 cm 39-43 cm 42-45 cm 45-49 cm 48-52 cm	75-82 cm 80-87 cm 85-92 cm 90-97 cm 95-102 cm 95-102 cm	
Lyftsele för brukare med låg tonus och som behöver stöd bakom huvudet.				


Handicare		Lyftsele hög (High Back) nylon		
OBS! Utgången modell, kan enbart förskrivas vid tillgång på lager.				
Material: Nylon	Rek. brukarvikt	Stussmått	Rygghöjd	
S-35035, Stl XS S-35036, Stl S S-35037, Stl M S-35038, Stl L S-35039, Stl XL S-35693, Stl XXL	20-35 kg 35-55 kg 45-80 kg 75-110 kg 100-150 kg 140-200 kg	27 cm 37 cm 50 cm 60 cm 65 cm 75 cm	65 cm 77 cm 89 cm 95 cm 98 cm 98 cm	
Lyftsele för brukare med låg tonus och som behöver stöd bakom huvudet.				

Handicare	Lyftsele hög (High Back) nät OBS! Utgången modell, kan enbart förskrivas vid tillgång på lager.			
Material: Nät	Rek. Brukarvikt	Stussmått	Rygghöjd	
S-35040, Stl XS	20-35 kg	25 cm	85 cm	
S-35041, Stl S	30-55 kg	35 cm	91 cm	
S-35042, Stl M	50-90 kg	45 cm	94 cm	
S-35043, Stl L	80-110 kg	56 cm	98 cm	
S-35044, Stl XL	110-160 kg	62 cm	98 cm	
S-35694, Stl XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm	
Lyftsele för brukare med låg tonus och som behöver stöd bakom huvudet.				


Hygienselar

Guldmann	Lyftsele hygien m bälte (Upphandlad hygiensele)			
Material: Nylon	Max. Brukarvikt	Stussmått	Rygghöjd	
S-18611, Stl XS S-18612, Stl S S-18613, Stl M S-18614, Stl L S-18615, Stl XL S-18616, Stl XXL	255 kg	33-37 cm 36-40 cm 39-43 cm 42-45 cm 45-49 cm 48-52 cm	75-82 cm 70-87 cm 85-92 cm 90-97 cm 95-102 cm 95-102 cm	
Lyftsele med stor skärning, utformad för att underlättar lyftsituationer i samband med toalettbesök och av/på klädnad. Förutsätter god tonus i bål och höfter.				


Handicare	Lyftsele hygien m bälte Handicare OBS! Utgången modell, kan enbart förskrivas vid tillgång på lager.			
Material: Polyester	Rek. Brukarvikt	Stussmått	Rygghöjd	
S-37861, Stl XS S-37862 Stl S S-37863 Stl M S-37864 Stl L S-37865, Stl XL	25-45 kg 40-60 kg 55-80 kg 75-110 kg 90-130 kg	28 cm 30 cm 35 cm 41 cm 46 cm	92 cm 96 cm 102 cm 102 cm 104 cm	
Lyftsele med stor skärning, utformad för att underlättar lyftsituationer i samband med toalettbesök och av/på klädnad. Förutsätter god tonus i bål och höfter.				


Handicare	Lyftsele hygien LB Sling (Low Back) OBS! Utgången modell, kan enbart förskrivas vid tillgång på lager.			
Material: Polyester	Rek. Brukarvikt	Stussmått	Rygg höjd	
S-39122, Stl XS	25-45 kg	28 cm	92 cm	
S-36548, Stl S	40-60 kg	30 cm	96 cm	
S-39027, Stl M	55-80 kg	35 cm	102 cm	
S-39028, Stl L	75-100 kg	41 cm	102 cm	
S-39170, Stl XL	90-130 kg	46 cm	104 cm	
Lyftselen ger en mer upprätt sittställning, vilket ger mer stadga i lyftet av brukare med lägre tonus.				


Hygienselar med extra stöd

Liko	Lyftsele hygien hög rygg (Ej upphandlad, specialmodell)		
Material: Nylon	Max brukarvikt	Västbredd	
S-11524 stl XS	XS - L 200 kg	60 cm	
S-11525 stl S		70 cm	
S-12201 stl M		80 cm	
S-33298 stl L		90 cm	
S-33299 stl XL		100 cm	
	XL 300 kg		



Amputationsselar

Guldmann	Lyftsele amputation mellanhög			
Material: Nylon	Max brukarvikt	Stussmått	Rygg höjd	
S-18713 stl S	255 kg	36-40 cm	80-87 cm	
S-18618 stl M		39-43 cm	85-92 cm	
S- 18714 stl L		42-45 cm	90-97 cm	
S-33838 stl XL		45-49 cm	95-102 cm	


Handicare	Lyftsele amputation OBS! Utgången modell, kan enbart förskrivas vid tillgång på lager.			
Material: Polyester/Nylon	Max brukarvikt	Stussmått	Rygghöjd	
S-41676 stl S S-40375 stl M S-41675 stl L S-39795 stl XL S-39796 stl XXL	300 kg	37 cm 45 cm 50 cm 60 cm 70 cm	90 cm 97 cm 100 cm 100 cm 100 cm	

Liko	Lyftsele amputation hög OBS! Utgången modell, kan enbart förskrivas vid tillgång på lager.		
Material: Nylon	Max brukarvikt	Rygghöjd	
S-12209 stl M	200 kg	Huvudhög	

Hel sele




Liko	Comfort-sele			
Material: Nät	Max brukarvikt	Stussmått	Rygghöjd	 
S-36139 stl M S-36140 stl L S-36059 stl XL S-33163 stl M S-36138 stl L S-36288 stl XL* *= toaöppning	200 kg - 300 kg 200 kg - 300 kg	56 cm 78 cm 80 cm 56 cm 67 cm 67 cm	100 cm 121 cm 128 cm 136 cm 145 cm 128 cm	
<p>Comfortselar, eller s.k. hela selar, saknar bendelar. Lämpliga för brukare som är smärtekänsliga, stela eller känner obehag vid lyft. Appliceras enbart i liggande och går ej att ta bort när brukaren sitter på selen i rullstol. Finns i mellanhög och hög modell.</p>				

Skalsele

Leverantör:	Liko			
Material: Nät	Max brukarvikt	Stussmått	Rek. personvikt	
S-09130, Stl XS S-06252, Stl S S-06272, Stl M S-14758, Stl L	200 kg	31 cm	20-28 kg	
		35 cm	25-50 kg	
		40 cm	45-75 kg	
		56 cm	65-100 kg	
Skalsele är gjord i tunt nätmaterial och saknar handtag, förstövningar eller extra sömmar. Skalselen är i första hand avsedd att användas i formgjutna sitsar och sittskal.				

Lyftvästar


Lyftväst finns i tre varianter, bakknäppt, framknäppt och för ståskal. Den framknäppta modellen kan med fördel väljas till brukare som själv kan ta på sig västen och som ev gör förflyttningen på egen hand.

Liko	Lyftväst bakknäppt			
Material: Nylon	Max brukarvikt	Västbredd	Personvikt	
S-09368, Stl XS	200 kg	60 cm	20-40 kg	
S-04947, Stl S	-	70 cm	40-60 kg	
S-01845, Stl M	-	80 cm	60-80 kg	
S-04948, Stl L	-	90 cm	80-100 kg	
S-07176, Stl XL	300 kg	100 cm	100-130 kg	
S-17209, Stl XXL	-	110 cm	120 -> kg	
Liko	Lyftväst framknäppt			
Material: Nylon	Max brukarvikt	Västbredd	Personvikt	
S- 08992, Stl XS	200 kg	60 cm	20-40 kg	
S- 06080, Stl S	-	70 cm	40-60 kg	
S- 06148, Stl M	-	80 cm	60-80 kg	
S- 12198, Stl L	-	90 cm	80-100 kg	
S- 12257, Stl XL	300 kg	100 cm	100-130 kg	
Liko	Lyftväst för Ståskal			
Material: Nylon	Max brukarvikt	Västbredd	Personvikt	
S-32795, Stl XS	200 kg	60 cm	10-20 kg	
S-13879, Stl S	-	70 cm	20-40 kg	
S-33096, Stl M	-	80 cm	40-60 kg	
Ståskalsvästen används vid lyft till och från ståskal.				

Tillbehör till lyftvästar

Grenband S-11631, passar till lyftväst XS/S S-11630, passar till lyftväst M/L S-11629, passar till lyftväst XL	
--	--

Lyftbyxa

Liko	Lyftbyxa			
Material: Stl M nät Stl L nylon	Max brukarvikt	Brukarlängd	Personvikt	
S-14257, Stl M S-06582, Stl L	200 kg -	160-180 cm 170-200 cm	50-85 kg 70-120 kg	
Lyftbyxa används till stå- och gå träning för den som har nedsatt balans och tonus.				

Övriga tillbehör

<p>Benpolstring Handicare S-35303, stl XS S-35304, Stl S/M S-35305, Stl L/XL Guldmann S-15359</p>	
<p>Förlängningsögla S-15362, Grå 20 cm S-15361, Grå 30 cm S-03872, Grön 20 cm S-03873, Grön 30 cm</p>	
<p>Huvudstöd S-15358, Guldmann</p>	
<p>Vändsele Turner S-36362, Guldmann S-36598, twin Stl M Guldmann</p>	
<p>Lyftsele för ben S-32866, Guldmann</p>	