


Hydroven 3 – tre kammare

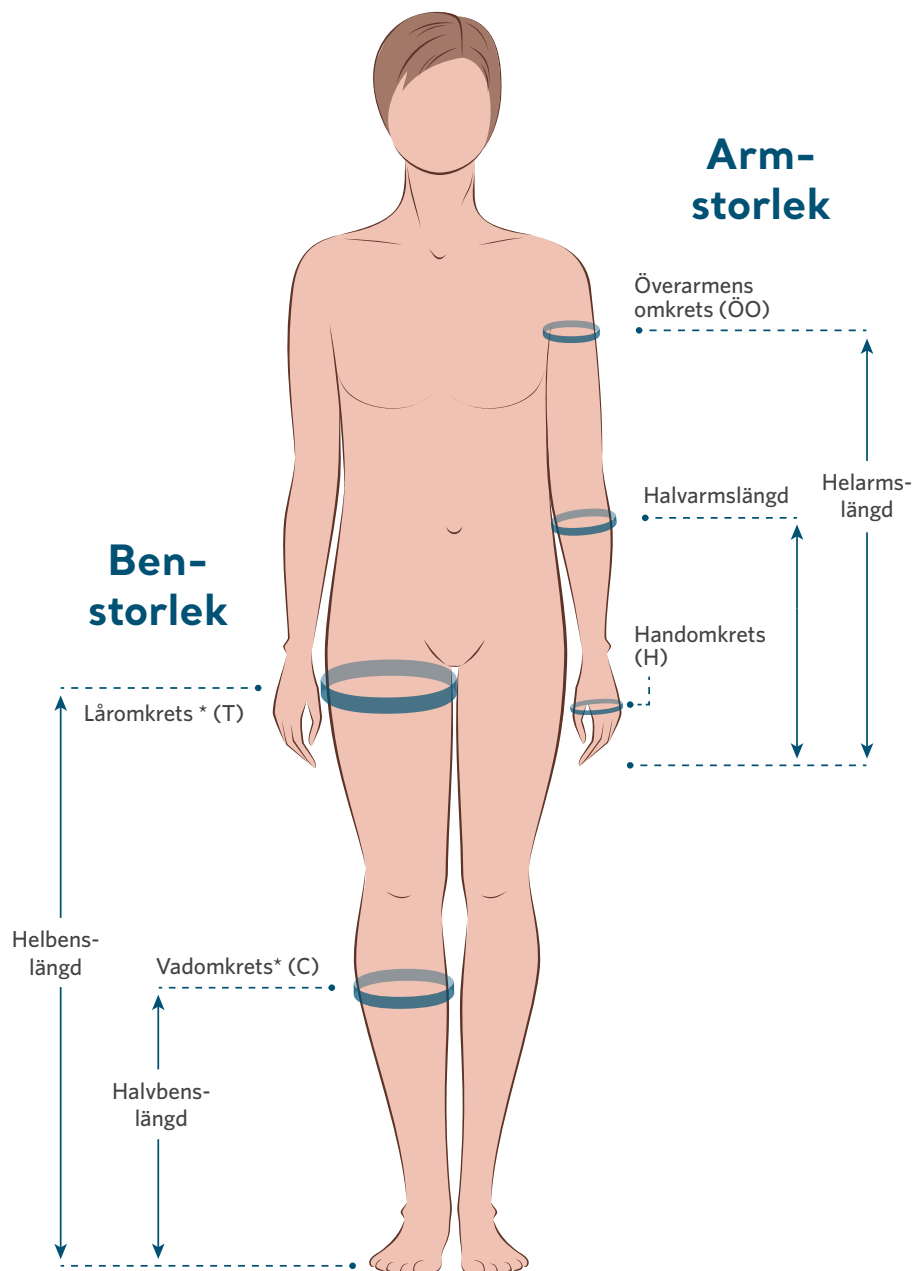

*Mätningarna ska göras på det bredaste stället på vaden respektive låret.

Mätguide för manschetter

Följande guide är avsedd att underlätta för användaren att välja rätt manschettstorlek.

För att fastställa rätt manschettstorlek:

- Ta bort eventuella bandage, strumpor och skrymmande förband
- Mät punkterna enligt diagrammet ovan
- Dra INTE åt måttbandet hårt
- Se till att manschetten sträcker sig utanför det område som behandlas



Hydroven 3 – arm

Armmanschetter med tre kammare

Artikelnummer	Typ	Längd (L)	Överarmens omkrets (ÖO)	Handomkrets (H)
5103A68	Hellång armmanschett	68 cm	62 cm	44 cm
5103A78	Hellång armmanschett	78 cm	62 cm	44 cm



Hydroven 3 – ben

Benmanschetter med tre kammare

Artikelnummer	Typ	Längd (L)	Låromkrets (T)	Vadomkrets (C)
5103L50	Knäkort benmanschett	50 cm	61 cm	56 cm
5103L66	Hellång benmanschett	66 cm	64 cm	56 cm
5103L71	Hellång benmanschett	71 cm	66 cm	56 cm
5103L76	Hellång benmanschett	76 cm	72 cm	56 cm
5103L84	Hellång benmanschett	84 cm	72 cm	56 cm
5103L92	Hellång benmanschett	92 cm	72 cm	56 cm



Hydroven-insatser

Kompatibel med Hydroven 1- och Hydroven 3-manschetter

Artikelnummer	Typ	Längd (L)	Utökad omkrets där änden är som bredast	Utökad omkrets där änden är som smalast
Beninsatser				
510LI50	Insatsdel för knäkort benmanschett	50 cm	19 cm	14 cm
510LI66	Insatsdel för hellång benmanschett	66 cm	19 cm	14 cm
510LI71	Insatsdel för hellång benmanschett	71 cm	19 cm	14 cm
510LI76	Insatsdel för hellång benmanschett	76 cm	19 cm	14 cm
510LI84	Insatsdel för hellång benmanschett	84 cm	19 cm	14 cm
510LI92	Insatsdel för hellång benmanschett	92 cm	19 cm	14 cm
Insatsdel för armmanschett				
510AI68	Insatsdel för hellång armmanschett	68 cm	17 cm	12 cm
510AI78	Insatsdel för hellång armmanschett	78 cm	17 cm	12 cm

