



Hjälpmiddelsentrum utbildar

# Antidecubitusmadrasser

## Innehållsförteckning

Kontaktuppgifter/information .....	1
Antidecubitusmadrasser .....	2
Hjälpmedelshandboken .....	2
Madrasser och madrasskydd .....	2
Fakta om trycksår .....	3
Handcheck .....	4
Bäddmadrass .....	5
Fibermadrass 3-delad .....	5
Optimal 5zon BM .....	6
Statisk luftmadrass .....	7
CuroCell SAM .....	7
CuroCell SAM Pro .....	8
Växeltrycksmadrass .....	9
CuroCell 3 CX13 .....	9
CuroCell A4 CX10 .....	10
CuroCell 4 pro .....	11
CuroCell A4 CX15 .....	12
Statisk luftmadrass 4-delad .....	13
Roho madrass .....	13
Låg basmadrass .....	14
Distansmadrass Prima 6 .....	14

## Kontaktuppgifter/information

### Kursansvarig hjälpmedelskonsulent

Eva Scharin

Telefon: 021-17 58 57

E-post: [eva.scharin@regionvastmanland.se](mailto:eva.scharin@regionvastmanland.se)

Sofie Söderbäck

Telefon: 021-17 68 34

E-post: [sofie.soderback@regionvastmanland.se](mailto:sofie.soderback@regionvastmanland.se)

Omvårdnadsärenden kan skickas till vår gemensamma e-post:

[hmc.omvardnad@regionvastmanland.se](mailto:hmc.omvardnad@regionvastmanland.se)

Vid brådskande ärenden, ring ovanstående hjälpmedelskonsulenter eller Kundtjänst via telefon 021-17 30 48.

Senaste versionen av förskrivarmaterialet hittar du på Vårdgivarwebben:

<https://regionvastmanland.se/vardgivare/behandlingsstod/hjalpmedel/omvardnad/>

# Antidecubitusmadrasser

## Hjälpmedelshandboken

Utdrag från vårdgivarwebben:

<https://regionvastmanland.se/vardgivare/behandlingsstod/hjalpmedel/hjalpmedelshandboken/i-hemmet/sangar-sangutrustning-och-madrasser/>

## Madrasser och madrasskydd

ISO-kod 04 33 06

### Kriterier för förskrivning

Förskrivs för att förebygga eller behandla trycksår.

*Madrass i förebyggande syfte:* Madrass för att användas i förebyggande syfte bör vara förstahandsval innan eventuellt sår uppkommit (sårkategori 1, 2).

*Madrass i behandlande syfte:* Behandlande madrass kan förskrivas då trycksår uppstått eller då risken för trycksår är hög (sårkategori 2, 3, 4).

Förskrivning av avancerad antidecubitusmadrass (sårkategori 4) styrs av det medicinska behovet.

*Låg basmadrass* (distansmadrass) kan förskrivas som tillbehör, om patienten använder sänggrindar, för att minska den totala madrasshöjden.

### Förskrivare

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och sjuksköterska.

Gäller för förskrivning av madrass i förebyggande eller i behandlande syfte.

### Kostnadsansvar

Ansvar 4 - regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

## Fakta om trycksår

Trycksår klassificeras av EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel) enligt följande kategorier:

**Kategori 1:** Hudrodnad som inte bleknar vid tryck

**Kategori 2:** Delhudsskada, blåsa eller ett ytligt öppet sår

**Kategori 3:** Fullhudsskada utan sårhåla

**Kategori 4:** Djup fullhudsskada där ben, sena eller muskel syns

**Icke klassificerbart trycksår:** Fullhudsskada med okänt sårdjup. Sårbotten döljs av död vävnad eller sårskorpa.

**Misstänkt djup hudskada:** Sårdjupet går inte att bedöma. Täcks av hel hud som är missfärgad eller av en blodblåsa.

### Risikfaktorer

- Oförmåga att röra sig
- Nedsatt allmäntillstånd
- Nyopererad
- Dåligt närings- och vätskeintag
- Mikroklimatet, dvs kombinationen av fukt och värme mellan hud och underlag
- Inkontinens
- Nedsatt känsel
- Nedsatt cirkulation
- Nedsatt medvetandegrad
- Feber, infektion
- Smärttillstånd

### Förebygga trycksår

- Bedöm trycksårsrisiken
- Bedöm huden
- Minska tryck
- Håll huden torr, mjuk och smidig
- Tillgodose och följ upp närings- och vätskebehov
- Informera patient och närstående
- Informera nästa vårdgivare vid överflyttning

## Handcheck

Handcheck utförs för att kontrollera att madrassen är korrekt inställd. Det ska varken vara för lite eller för mycket luft i madrassen. Är det för lite luft riskerar patienten att ligga igenom madrassen, är det för mycket luft kan det bli för hårt och ge tryckmärken på huden.

Handcheck bör, förutom vid installation, även göras regelbundet i samband med omvårdnad, vid positionsändringar eller vid ändring av någon inställning.

Vid handcheck sticks en flat hand in vid madrassens celler i sätesregionen, för att säkerställa att det är några centimeter luft kvar mellan patient och underliggande madrass.

I leverantörens bruksanvisning finns mer detaljerade instruktioner angående installation av madrassen samt hur handcheck på aktuell madrass ska utföras.

Leverantören Care of Sweden har även filmer hur handcheck ska utföras på deras luftmadrasser: [www.careofsweden.se](http://www.careofsweden.se)

## Bäddmadrass



### Fibermadrass 3-delad

(f.d. Liljenberg-madrassen)

Mjuk bäddmadrass med fyllning av silikoniserad polyesterhålfiber. Placeras ovanpå basmadrass.

Speciellt lämplig för magra, lätta patienter.

Lagervara

**Sesam-nr:** 15222\*

**Kategori:** Förebyggande

**Mått:** 90x200 cm

**Brukarvikt:** Max 95 kg (HMC:s rekommendation max 75 kg)

**Leverantör:** Comco

**OBS!** Försäljningsvara, **skall ej återlämnas till HMC.**



### **Optimal 5zon BM**

Bäddmadrass av kallskum med hygienöverdrag. Placeras ovanpå basmadrass.

Lagervara

<b>Sesam-nr:</b>	34420
<b>Kategori:</b>	Förebyggande
<b>Mått:</b>	90x200x6 cm
<b>Brukarvikt:</b>	Max 130 kg
<b>Leverantör:</b>	Care of Sweden

**Optimal 5zon 105 cm bred S-34673. Beställningsvara.**



## Statisk luftmadrass



### CuroCell SAM

Statisk luftmadrass med pump. Placeras ovanpå basmadrass.

Kan enbart förskrivas vid tillgång på lager.

**Sesam-nr:** 37509 (madrass inkl kompressor)

**Kategori:** T.o.m. sårkategori 2

**Mått:** 90x200x10 cm

**Brukarvikt:** Max 200 kg

**Leverantör:** Care of Sweden

**CuroCell SAM 105 cm bred S-37511.** Kan enbart förskrivas vid tillgång på lager.



## CuroCell SAM Pro

Statisk luftmadrass med pump. Placeras ovanpå basmadrass.

Lagervara

**Sesam-nr:** 41842 (kompl madrass inkl pump)

**Kategori:** T.o.m. sårkategori 3

**Mått:** 90x200x10 cm

**Brukarvikt:** Max 250 kg

**Leverantör:** Care of Sweden

**CuroCell SAM Pro 105 cm bred S-41843. Beställningsvara.**

## Växeltrycksmadrass



### CuroCell 3 CX13

Växeltrycksmadrass med pump. Placeras ovanpå basmadrass.

Kan enbart förskrivas vid tillgång på lager. Ersätts från 2021 vid nyköp av CuroCell A4 CX10.

**Sesam-nr:** 34513 (kompl madrass inkl pump)

**Kategori:** T.o.m. sårgrad 3

**Mått:** 90x200x13

**Brukarvikt:** Max 160 kg

**Leverantör:** Care of Sweden

**CuroCell 3 CX13 105 cm bred S-34518.** Kan enbart förskrivas vid tillgång på lager.



## **CuroCell A4 CX10**

Växeltrycksmadrass med pump/kontrollenhet. Placeras ovanpå basmadrass.

Helautomatisk, ingen inställning av brukarvikt behövs.

**Sesam-nr:** 41840 (kompl madrass inkl pump)

**Kategori:** T.o.m. sårkategori 4

**Mått:** 90x200x10 cm

**Brukarvikt:** Max 200 kg

**Leverantör:** Care of Sweden

**CuroCell A4 CX10, 105 cm bred S-41841. Beställningsvara.**



## CuroCell 4 pro

Växeltrycksmadrass med pump. Ersätter både basmadrass och bäddmadrass. Placeras direkt på sängbotten.

Kan enbart förskrivas vid tillgång på lager. Ersätts från 2021 vid nyköp av CuroCell A4 CX15.

**Sesam-nr:** 34659 (kompl madrass inkl pump)

**Kategori:** T.o.m. sårkategori 4

**Mått:** 90x200x21 cm

**Brukarvikt:** Max 200 kg

**Leverantör:** Care of Sweden

**CuroCell 4 Pro, 105 cm bred S-36995.** Kan enbart förskrivas vid tillgång på lager



## CuroCell A4 CX15

Växeltrycksmadrass med pump/kontrollenhet. Ersätter både basmadrass och bäddmadrass. Placeras direkt på sängbotten.

Helautomatisk, ingen inställning av brukarvikt behövs.

**Sesam-nr:** 42099 (kompl madrass inkl pump)

**Kategori:** T.o.m. sårkategori 4

**Mått:** 90x200x15 cm

**Brukarvikt:** Max 220 kg

**Leverantör:** Care of Sweden

**CuroCell A4 CX15 105 cm bred S-42100.**

## Statisk luftmadrass 4-delad



## Roho madrass

Statisk madrass med luftfyllda celler. Placeras ovanpå basmadrass.

Madrassdelarna pumpas upp individuellt med medföljande handpump, knäpps sen ihop med tryckknappar.

Beställningsvara

**Sesam-nr:** 16589

**Kategori:** T.o.m. sårkategori 4

**Mått:** 86x49x8,5 cm/del (**Önskas hel madrass beställs 4 delar**)

**Brukarvikt:** Obegränsad

**Leverantör:** Permobil

## Låg basmadrass



## Distansmadrass Prima 6

Låg basmadrass. Skumkärna med hygienöverdrag.

Används under luftmadrass för att sänka den totala madrasshöjden, för att säkerställa tillräcklig höjd på vårdängens grindar.

**Obs! Är *inte* avsedd att användas som bäddmadrass.**

Lagervara

<b>Sesam-nr:</b>	42012
<b>Kategori:</b>	Standardmadrass
<b>Mått:</b>	90x200x6 cm
<b>Brukarvikt:</b>	Max 130 kg
<b>Leverantör:</b>	Care of Sweden

**Distansmadrass Prima 6 105 cm bred S-42013. Beställningsvara.**