

Hjälpmiddelsentrum utbildar

# Förflyttningshjälpmedel



**Ansvariga hjälpmedelskonsulenter**

Björn Flenner sjö, telefon: 070-257 00 22

E-post: [bjorn.flennersjo@regionvastmanland.se](mailto:bjorn.flennersjo@regionvastmanland.se)

Susanne Pettersson, telefon: 070-266 52 55

E-post: [susanne.pettersson@regionvastmanland.se](mailto:susanne.pettersson@regionvastmanland.se)

**2024**

## Innehåll


Artikelansvar (tidigare nivåindelning): .....	3
Glidhjälpmedel	
Glidmattor .....	4
Blue Motion Slide Soft .....	4
Ready slide .....	4
OnewaySlide .....	4
Segelduk .....	5
Glidlakan .....	5
Wendylett komplett med glid- och draglakan .....	5
Glidörngott WendyLean .....	6
Topsheet .....	6
Glidbrädor .....	7
Easyglide.....	7
Vridplattor och Överflyttningsplattformar	
Vridplattor .....	8
Vridplatta Rondo .....	8
Vridplatta Turntable .....	8
Turner .....	8
Överflyttningsplattformar	
Molift Raiser .....	9
Tillbehör Molift .....	9
ReTurn .....	10
Tillbehör ReTurn .....	10
Sara Steady .....	11
Övriga Förflyttningshjälpmedel	
FlexiGrip .....	12
FlexiMove .....	12
Antislip .....	13
Fotpall .....	13
MoveMaster .....	13
Vårdbälten	
Flexibelt, Hug .....	14
Easybelt, Hug .....	14
EasyBelt .....	15
Flexibelt .....	15

## Artikelansvar (tidigare nivåindelning):

Artikelansvar (tidigare nivåindelning):	
Ansvar 1	Regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel är hjälpmedel som är komplexa och kostsamma till exempel eldrivna rullstolar, kommunikationssystem samt tillbehör till dessa.
Ansvar 2	Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel på hjälpmedel är manuella rullstolar och rollatorer.
Ansvar 3	Rekvisitionshjälpmedel. Enklare hjälpmedel som inte förskrivs via Hjälpmedelscentrum. Beställs till enheten, oftast i större antal. Hjälpmedlen är försäljningshjälpmedel. Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Hjälpmedel som används i hemsjukvård betalas av Region Västmanland. Exempel på hjälpmedel är badbräda och förhöjningsklossar.
Ansvar 4	Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Kommunen har betalningsansvar för patienter som bor i särskilda boendeformer men beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel på hjälpmedlen är omvårdnadshjälpmedel som personlyftar, dusch- och toalettstolar på hjul och reglerbara sängar.

## Glidmattor

### Blue Motion Slide Soft



<b>Leverantör:</b>	Human Care	
<b>Funktion:</b>	Tunnelsydd glidmatta i tunt glatt tyg för minskad friktion.	
<b>Art.nr &amp; storlek</b>	436 21, 70x70 cm 436 22, 110x70 cm 436 23, 195x70 cm  Försäljningsartikel.	

### Ready slide

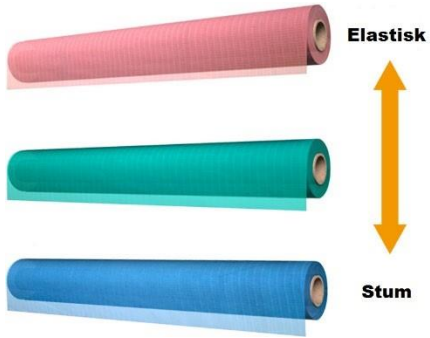
Utgående artikel, kan beställas i mån av tillgång.

<b>Leverantör:</b>	Direct Healthcare Group	
<b>Funktion:</b>	Tunnelsydd glidmatta i tunt glatt tyg för minskad friktion.	
<b>Art.nr &amp; storlek</b>	327 30, 70x70 cm 364 51, 110x70 cm 330 42, 195x70 cm  Försäljningsartikel.	

### OnewaySlide


<b>Leverantör:</b>	Direct Healthcare Group	 <p>Tubformad</p>  <p>Öppen med dragband används i rullstol</p>
<b>Funktion:</b>	Används för att lättare komma längre bak i stol/rullstol.	
<b>Art.nr &amp; storlek</b>	Tubformad 184 26, 40x50 cm 123 05, 45x50 cm  Öppen med dragband 167 96, 130x40 cm 162 66, 130x45 cm	
<b>Max Brukarvikt:</b>	150 kg	

## Segelduk


<b>Leverantör:</b>	Brehms Spilerduk ApS	 <p><b>Elastisk</b></p> <p><b>Stum</b></p>
<b>Funktion:</b>	Säljs på 10 metersrulle, 1 m bred. Rekvissionsartikel.  Bör klippas med tandsax för att inte repa upp sig.	
<b>Art.nr &amp; storlek</b>	399 33, tunnast material (röd) 399 32, mellan (grön) 399 31, tjockast material (blå)	

## Glidlakan



### Komplett med glid- och draglakan

<b>Leverantör:</b>	Direct Healthcare Group, Etac	 <p>2-vägsglid</p> <p>4-vägsglid</p>
<b>Funktion:</b>	Glidlakan finns som 2-vägsglid och 4-vägsglid.  Försäljningsartiklar.	
<b>Art.nr &amp; storlek</b>	<p>DHG, Wendylett</p> <p>2-vägsglid, komplett</p> <p>126 82, L140 x B200 cm, 60 cm glidyta</p> <p>126 81, L100 x B200 cm, 60 cm glidyta</p> <p>162 64, L200 x B200 cm, 70 cm glidyta</p> <p>2-vägsglid, komplett, formsydd med resår</p> <p>172 12, L200 x B90 cm glidlakan</p> <p>70 cm glidyta</p> <p>L140xB200 draglakan</p> <p>Etac</p> <p>4-vägsglid, komplett med handtag</p> <p>439 84, L140 x B200 cm glidlakan 60 cm glidyta</p> <p>L140 x B200 draglakan</p> <p>4-vägsglid, komplett utan handtag</p> <p>440 01, L200 x B200 cm glidlakan</p> <p>L140 x B200 cm draglakan</p>	

## Glidörngott WendyLean



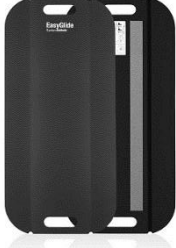
<b>Leverantör:</b>	Direct Healthcare Group	
<b>Funktion:</b>	2-vägsglid. Försäljningsartikel.	
<b>Art.nr &amp; storlek</b>	143 95, 50x60cm	

## Topsheet

<b>Leverantör:</b>	Direct Healthcare Group	 
<b>Funktion:</b>	För vändning och/eller skötsel i säng tillsammans med personlyft. Friktionsreducerande undersida. Försäljningsartikel.	
<b>Art.nr &amp; storlek</b>	344 76, 155x140 cm.	
<b>Max Brukarvikt:</b>	250 kg	

## Glidbrädor

### Easyglide

Leverantör:			
Art.nr	Storlek & form	Max brukarvikt:	
113 84	45x20cm, Rektangulär, ej vikbar	135–150 kg (Avgörs av hur stor yta det är som saknar understöd, max 10 cm)	
113 85	60x25cm, Rektangulär, ej vikbar	Som ovan	
343 44	45x20 cm, oval 2-pack	135 – 300 kg (Avgörs av hur stor yta det är som saknar understöd, max 5cm)	
347 44	85x39 cm, oval 2-pack	Som ovan	
026 92	60x33 cm, rektangulär, vikbar	135–150 kg (Avgörs av hur stor yta det är som saknar understöd, max 10 cm)	
026 93	75x33 cm, rektangulär, vikbar	Som ovan	

# VRIDPLATTOR OCH ÖVERFLYTTNINGSPLATTFORMAR

## Vridplattor


### Vridplatta Rondo

<b>Leverantör:</b>	Kvistberga Group AB	
<b>Funktion:</b>	Vridplattan är lämplig när användaren inte kan flytta med fötterna i samband med låg förflyttning. Försäljningsartikel.	
<b>Art.nr &amp; storlek</b>	018 41, 32 cm 066 52, 38 cm	
<b>Maxbelastning:</b>	1000 kg	

### Vridplatta Turntable

<b>Leverantör:</b>	Direct Healthcare Group	
<b>Funktion:</b>	Används vid förflyttning i och ur bil samt på stol.	
<b>Art.nr &amp; storlek</b>	362 21, 40 cm 330 84, 45 cm	
<b>Max Brukarvikt:</b>	150 kg	

### Turner

<b>Leverantör:</b>	ETAC Sverige AB	
<b>Funktion:</b>	Förenklar uppresning och förflyttning från en sits till en annan. Används av brukare som har gripfunktion och klarar av att bära sin egen kroppsvikt, men behöver stöd/hjälp vid uppresning och förflyttning.	
<b>Art.nr &amp; storlek</b>	099 96, höjd 80–120 cm	
<b>Max brukarvikt:</b>	200 kg	



## Överflyttningsplattformar

### Molift Raiser

<b>Leverantör:</b>	ETAC Sverige AB	 Molift Raiser      Molift Raiser Pro
<b>Funktion:</b>	Förenklar uppresning och förflyttning från en sits till en annan. Används av brukare som har gripfunktion och klarar av att bära sin egen kroppsvikt, men behöver stöd/hjälp vid uppresning och förflyttning.	
<b>Art.nr &amp; storlek</b>	Molift Raiser (utgått leverantör) 383 35, höjd 123 cm  Molift Raiser Pro 414 10, höjd 120 cm	
<b>Max brukarvikt:</b>	Molift Raiser: 150 kg Molift Raiser Pro: 170 kg	
<b>Övrigt:</b>	Molift Pro är några cm smalare och har lägre instegshöjd (3,5 cm på Pro och 5 cm på Raisern).	



### Tillbehör Molift

<b>Trygghetsband med glidhylsa</b> 383 05, stl S/M 383 06, stl L/XL	
<b>Ståplatta Molift Raiser Pro</b> 424 24 Plattan är 9 cm hög	
<b>Hälband</b> 424 25	
<b>Uppresningshandtag</b> 429 43	

## ReTurn

	Direct Healthcare Group	
<b>Funktion:</b>	Förenklar uppresning och förflyttning från en sits till en annan. Används av brukare som har gripfunktion och klarar av att bära sin egen kroppsvikt, men behöver stöd/hjälp vid uppresning och förflyttning.	
<b>Art.nr &amp; storlek</b>	175 53, 115 cm 351 25, 121 cm	
<b>Max brukarvikt:</b>	175 53, 150 kg 351 25, 205 kg	

## Tillbehör ReTurn

<p><b>Returnbelt</b> Är ett bälte med stöd under stussen för att undvika uppglidning.</p> <p>359 45, stl XXS, 65–80 cm 340 93, stl XS, 75–90 cm 326 11, stl S, 85–105 cm 169 55, stl M, 105–125 cm 173 68, stl L, 120–145 cm 328 07, stl XL, 140–165 cm</p>	
<p><b>Hälband</b></p> <p>349 81</p>	


## Sara Steady

<b>Leverantör:</b>	Arjo	
<b>Funktion:</b>	Förenklar uppresning och förflyttning från en sits till en annan. Används av brukare som har gripfunktion och klarar av att bära sin egen kroppsvikt, men behöver mer stöd/hjälp vid uppresning och förflyttning.  <b>OBS!</b> Får ej användas i dusch	
<b>Art.nr</b>	372 64 Kontakta konsulent vid förskrivning.	
<b>Max brukarvikt:</b>	182 kg	


Sele finns som tillbehör, kontakta konsulent vid behov

## ÖVRIGA FÖRFLYTTNINGSHJÄLPMEDEL

### FlexiGrip

<b>Leverantör:</b>	Direct Healthcare Group	
<b>Art.nr</b>	132 07	
<b>Storlek:</b>	9x175 cm, 8 handtag	
<b>Max brukarvikt:</b>	150 kg	
<b>Användning:</b>	Att underlätta förflyttning liggande till sittande i säng	


### FlexiMove

<b>Leverantör:</b>	Direct Healthcare Group	
<b>Art.nr &amp; storlek</b>	026 91, 102x43 cm, 4 handtag. 162 63, 150x53 cm, 6 handtag. 126 15, 20x60 cm, insida i nylon. 126 16, 20x60 cm, insida i sammet.	
<b>Max brukarvikt:</b>	150 kg	
<b>Användning:</b>	Används exempelvis vid uppresning från sittande, högre upp i säng.	

102x43 cm

20x60 cm


## Antislip

<b>Leverantör:</b>	Direct Healthcare Group	
<b>Art.nr</b>	174 12	
<b>Storlek:</b>	45x38 cm	
<b>Max brukarvikt:</b>	-	
<b>Användning:</b>	Antihalkmatta för att underlätta vid förflyttning i säng. Försäljningsartikel.	

## Fotpall

<b>Leverantör:</b>	Direct Healthcare Group	
<b>Art.nr</b>	184 75	
<b>Storlek:</b>	32x38x10 cm	
<b>Max brukarvikt:</b>	200 kg	
<b>Användning:</b>	Används vid sittande förflyttningar, vid toalettbesök samt vid positionering längre bak i stol/rullstol. Försäljningsartikel.	


## MoveMaster

<b>Leverantör:</b>	Direct Healthcare Group	
<b>Art.nr</b>	149 44	
<b>Storlek:</b>	47x120 cm	
<b>Max brukarvikt:</b>	150 kg	
<b>Användning:</b>	Används för överflyttningar mellan säng och rullstol/mobil toastol.	


## VÅRDBÄLTEN

Vårdbälten från Direct Healthcare Group finns i fyra varianter, alla har handtag både i vertikal och i horisontell riktning. Max brukarvikt 170 kg

### Flexibelt, Hug


<b>Leverantör:</b>	Direct Healthcare Group			
<b>Övrigt:</b>	Sammetsklädd insida Rörliga, horisontella handtag som glider fritt i öglor och som gör att bältet "kramar om" brukaren i stället för att glida upp under olika förflyttningssituationer.			
				
<b>Modell</b>	<b>Flexibelt, Hug stl S</b>	<b>Flexibelt, Hug stl M</b>	<b>Flexibelt, Hug stl L</b>	<b>Flexibelt, Hug stl XL</b>
Art.nr	436 25	436 26	436 27	436 28
Antal handtag	5	7	9	11
Omkrets	45-70cm	60-100cm	70-120cm	100-160cm

### Easybelt, Hug

<b>Leverantör:</b>	Direct Healthcare Group			
<b>Övrigt:</b>	Avtorkningsbar insida Rörliga, horisontella handtag som glider fritt i öglor och som gör att bältet "kramar om" brukaren i stället för att glida upp under olika förflyttningssituationer.			
				
<b>Modell</b>	<b>Easybelt, Hug stl XS</b>	<b>Easybelt, Hug stl S</b>	<b>Easybelt, Hug stl M</b>	<b>Easybelt, Hug stl L</b>
Art.nr	436 29	436 30	436 31	436 32
Antal handtag	5 (3+2 rörliga)	7 (4+3 rörliga)	9 (5+4 rörliga)	11 (6+5 rörliga)
Omkrets	45-70cm	60-100cm	70-120cm	100-160cm


## EasyBelt

Utgående artikel, kan beställas i mån av tillgång.

<b>Leverantör:</b>	Direct Healthcare Group				
<b>Övrigt:</b>	Avtorkningsbar insida				
<b>Modell</b>	<b>EasyBelt stl XS</b>	<b>EasyBelt stl S</b>	<b>EasyBelt stl M</b>	<b>EasyBelt stl L</b>	
Art.nr	110 37	026 94	026 95	026 96	
Antal handtag	5	7	9	11	
Omkrets	45-70cm	60-100cm	70-120cm	100-160cm	

## FlexiBelt

Utgående artikel, kan beställas i mån av tillgång.

<b>Leverantör:</b>	Direct Healthcare Group				
<b>Övrigt:</b>	Sammetsklädd insida				
<b>Modell</b>	<b>FlexiBelt stl S</b>	<b>FlexiBelt stl M</b>	<b>FlexiBelt stl L</b>	<b>FlexiBelt stl XL</b>	
Art.nr	117 08	098 89	117 09	117 07	
Antal handtag	7	9	11	13	
Omkrets	60-100cm	70-120cm	100-160cm	115-175cm	