

Hjälpmiddelsentrum utbildar

Träningshjälpmedel



Ansvarig hjälpmedelskonsulent

Björn Flennersjö, telefon: 070-2570022

E-post: bjorn.flennersjo@regionvastmanland.se

Våren 2022

Innehåll

Hjälpmiddelsentrum utbildar	1
Förskrivningsregler	3
Artikelansvar (tidigare nivåindelning)	3
Ersättningskedjor	3
Förskrivningskriterier	4
Träningshjälpmedel	5
Tippbrädor	5
Tippbräda Union Twin Primed	5
Ståstöd	6
EasyStand Evolv I, II & III	6
Ståstöd Spacemaker	7
Gångbarr	8
Manuella arm- och benträningshjälpmedel	9
Bentränare Primed	9
Arm- och bentränare Primed	9
THERA-Trainer activo 574	10
Armtränare med stativ	11
Manuped	11
Elektriska arm- och benträningshjälpmedel	12
THERA Trainer Mobi	12
Motomed Loop	12
Motomed Viva 2	14
Övriga träningshjälpmedel	15
Cylinderkudde	15
Gymnastikmatta	15
Kilkudde	16

Förskrivningsregler

Artikelansvar (tidigare nivåindelning)

Artikelansvar (tidigare nivåindelning):	
Ansvar 1	Regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel är hjälpmedel som är komplexa och kostsamma till exempel eldrivna rullstolar, kommunikationssystem samt tillbehör till dessa.
Ansvar 2	Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel på hjälpmedel är manuella rullstolar och rollatorer.
Ansvar 3	Rekviritions-hjälpmedel. Enklare hjälpmedel som inte förskrivs via Hjälpmedelscentrum. Beställs till enheten, oftast i större antal. Hjälpmedlen är försäljningshjälpmedel. Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Hjälpmedel som används i hemsjukvård betalas av Region Västmanland. Exempel på hjälpmedel är badbräda och förhöjningsklossar.
Ansvar 4	Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Kommunen har betalningsansvar för patienter som bor i särskilda boendeformer men beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel på hjälpmedlen är omvårdnadshjälpmedel som personlyftar, dusch- och toalettstolar på hjul och reglerbara sängar.

Ersättningskedjor

Ersättningsgrupper används för att föreslå alternativa/ersättningsartiklar för att på så sätt använda artiklar i lager först.

Ersättningsartikel

Vid beställning av en artikel som ersatt en artikel som utgått ur sortimentet. Den utgånga artikeln finns i lager och WebSesam föreslår den som första val. Ersättningsartiklar visas även om den nya artikeln, som angivits på orderraden, har saldo. Ersättningsartiklar visas endast då de har saldo.

Alternativartikel

Vid beställning av en artikel som inte finns i lager för leverans. WebSesam visar likvärdiga alternativ som finns i lager för leverans med nästa turbil. Alternativa artiklar visas i rangordning. Alternativa artiklar föreslås när saldot är noll på den artikel som angivits på orderrad. Endast alternativa artiklar med saldo visas.

Förskrivningskriterier

Om träningshjälpmedlet används till flera personer betraktas det som verksamhetsansvar och köps eller hyrs av enheten.

Träningshjälpmedel kan enbart förskrivas när träningen är långvarig och regelbunden.

Artikel	Kriterier	Kommentarer
Ståstöd	Kan förskrivas till personer utan självständig gångförmåga. Vid förskrivning ska stå- och/eller belastningsträningen vara regelbunden samt en del av en fysioterapeutisk behandling.	Easystand förskrivs i samråd med konsulent. Spacemaker förskrivs i Websesam.
Barr	Kan förskrivas till personer utan självständig gångförmåga. Vid förskrivning ska träningen vara regelbunden, långvarig och som en del i en fysioterapeutisk/sjukgymnastisk behandling.	Förskrivs i samråd med konsulent
Arm- och bentränare manuell	Att användas vid styrke- och rörlighetsträning, till personer med nedsatt gångförmåga.	Förskrivs i Websesam
Elektrisk ben/armtränare	För cirkulatorisk träning. Till personer utan gångförmåga.	Förskrivs i Websesam
Tippbräda	Stå- och belastningsträning till personer utan självständig gångförmåga.	Förskrivs i Websesam
Gymnastikmatta, cylinderkudde och Bobathboll	Kan förskrivas till patient med grav led-, muskel-, eller neurologisk sjukdom, som kan bibehålla rörlighet och cirkulation med daglig träning.	Förskrivs i Websesam

Träningshjälpmedel

Tippbrädor

Förskrivs i Websesam. För ordination krävs långsiktig och intensiv träning med tydliga fysio-/sjukgymnastiska mål. Dessutom ska all personal kring brukaren vara informerad om träningen. Tänk på att tippbrädan kräver en hel del plats i hemmet!

Tippbräda Union Twin Primed

Leverantör:	Primed Fysio Och Rehab AB	
Artikelnr	33919	
Funktion:	Elektrisk höj/sänkbar samt elektrisk tippning Levereras med två stycken bröst/höftbälten (art.nr 33924) samt 1 fixeringsbälte bendel (art. 36054)	
Max brukarvikt:	140 kg	
Mått:	Höjd 56-106 cm Längd 200 x Bredd 60 cm	

Tillbehör Union Twin



<p>Bål/höftstöd</p> <p>Art.nr 37556 Platta (kommer som styck)</p> <p>Art.nr 3928 Rulle (kommer som styck)</p>	 <p style="text-align: center;">33928 37556</p>
<p>Fixeringsbälte</p> <p>Art.nr 33929 Fixeringsbälte delad bendel</p> <p>Art.nr 36054 Fixeringsbälte hel bendel (26 cm)</p> <p>Art.nr 33924 Fixeringsbälte Bröst/Höft (17 cm bred)</p>	 <p style="text-align: center;">33924 36054 33929</p>
<p>Bord</p> <p>Art.nr 33925</p> <p>Justerbart i höjd och djup, storlek 70x56cm</p>	
<p>Sandaler</p> <p>Art.nr 33926 Sandaler till fotplatta</p>	

Ståstöd

EasyStand Evolv I, II & III

Utprovning sker tillsammans med konsulent och leverantör.

Evolv I har ett pelarbord medan Evolv II och III har bord som sitter fast i ryggstödet och följer med vid uppresning/nedsittning. Evolv II har utgått från leverantör, men går att förskriva i mån av tillgång på HMC.

Leverantör:	Anatomic Sitt AB				 Evolv II & III  Evolv I
Funktion:	Manuell/elektrisk upphissning till stående.				
Max brukarvikt:	90 – 159 kg (beroende på modell)				
Mått (i cm):	Storlek	M	L	XL	
	Brukarlängd:	122-168	152-188	183-211	
	Max brukarvikt i kg:	90	127	159	
	Sitshöjd från golv:	55	55	60	
	Sittdjup:	36-48	41-53	48-61	

I grundutförande ingår: sits, bord, fotstöd och fotplattor. Resten väljs som tillbehör nedan


Tillbehör Easystand

Knästöd		
Art.nr 36859 Helt knästöd		
Art.nr 37421 Delat knästöd		
Art.nr 40968 Delat knästöd med ROHO material		
	36859	37421
Bälten		
Art.nr 16057 Höftbälte		
Art.nr 16048 Brösthälte S (77-118cm)		
Art.nr 16049 Brösthälte L (86-137cm)		
	Höftbälte	Brösthälte




<p>Rygg</p> <p>Art.nr 16050 Rygg låg rak</p> <p>Art.nr 16051 Rygg hög rak</p> <p>Art.nr 16052 Rygg låg kroppsformad</p> <p>Art.nr 16053 Rygg hög kroppsformad</p>	 <p>16050 16051</p> <p>16052 16053</p>
<p>Bål- & Höftstöd</p> <p>Art.nr 38998 Bålstöd stl medium*</p> <p>Art.nr 36228 Höftstöd stl medium</p> <p>*= måste kombineras med fäste (artikel.nr 36860)</p>	 <p>Höftstöd Bålstöd</p>
<p>Handtag</p> <p>Art.nr 36468 Pumphantagsförlängare</p> <p>Art.nr 36227 Pumphantag avtagbart</p>	 <p>Pumphantag Pumphantagsförlängare</p>

Ståstöd Spacemaker

Utgående artikel, går att förskriva i mån av tillgång.


Leverantör:	AlfaCare Sverige AB	
Artikelnr	07119	
Funktion:	Kan utrustas med elvinsch för upprensningshjälp.	
Max brukarvikt:	120 kg	
Mått:	Ståyta B 69 x D 58 cm Höjd: Ståplatta/Bord 79 – 121 cm Total storlek B 75 x D 90 cm	

Tillbehör Spacemaker

Räcke till bordskiva Art.nr 11344	
Hälfixering Art.nr 09405	
Elvinsch Art.nr 14121 OBS! Har eget individ.nr, går inte att lägga som komponent.	

Gångbarr


Förskrivs i samråd med konsulent.

Leverantör:	Medema AB	
Artikelnr	10533	
Max brukarvikt:	140 kg	
Mått:	3 meter lång Höj- och sänkbar mellan 70-95 cm. Bredd mellan ledstängerna: 55 cm	


Manuella arm- och benträningshjälpmedel

Manuella arm- och bentränare går att förskriva till personer med nedsatt gångförmåga, för att bibehålla rörlighet och cirkulation.

Bentränare Primed

Leverantör:	Primed Fysio och Rehab AB	
Artikelnr:	32981	
Funktion:	Cykeldator visar tid, sträcka och hastighet. Har steglös justering av motståndet. Levereras med golvplattor.	

Arm- och bentränare Primed


Leverantör:	Primed Fysio och Rehab AB	
Artikelnr:	43081	
Funktion:	Används till sittande eller liggande patienter. Cykeldator visar tid, sträcka och hastighet. Har steglös justering av motståndet.	

Tillbehör Primed



Golvplattor Art.nr 36238 Golvplattor	
Stabiliseringsstag Art.nr 17076 Stabiliseringsstag för rullstol Justerbart i höjddled mellan 70-104 cm.	
Funktionsvante Art.nr 16336 Försäljningsartikel	

Thera-Trainer activo 574

Utgående artikel, går att förskriva i mån av tillgång.


Leverantör:	Fysioline Sweden AB	
Art.nr	39715	
Funktion:	Justeringsbart motstånd. Träningsparametrar som visas i displayen: – Totalt antal varv (CNT) (visas kontinuerligt) – Träningens varaktighet (TIME) – Kaloriförbrukning (CAL) - Varv per minut (STRIDES/MIN)	
vikt:	10-11 kg (beroende på utrustning)	
Övrigt:	Viktigt att ändra på komponentsbilden så att den blir utrustad med handtag eller fotplattor.	

Tillbehör Thera-Trainer

Funktionshandske Art.nr 39734 Funktionshandske mobi & activo 574. Försäljningsartikel.	
Stabiliseringsstag Art.nr 17076 Stabiliseringsstag för rullstol. Justerbart i höjddled mellan 70-104 cm.	

Armtränare med stativ


Utgående artikel, går att förskriva i mån av tillgång.

Leverantör:	Primed Fysio Och Rehab AB	
Artikelnr.	32983	
Funktion:	Cykeldator visar tid, sträcka och hastighet. Har steglös justering av motståndet.	
Övrigt:	Ser ut som Manupeden men saknar fotplattorna.	

Tillbehör Armtränare med stativ

Samma som till Primed.

Manuped

Leverantör:	Primed Fysio Och Rehab AB	
Artikelnr:	32982	
Funktion:	Cykeldator visar tid, sträcka och hastighet. Har steglös justering av motståndet. Levereras med golvplattor.	


Tillbehör Manuped

Samma som till Primed

Elektriska arm- och benträningshjälpmedel

Elektriska cyklar kan förskrivas av cirkulatoriska skäl, till brukare som saknar självständig gångförmåga.



Thera Trainer Mobi

Leverantör:	Fysioline Sweden AB	
Artikelnr	39714	
Funktion:	Justeringsbart motstånd. Följande träningsparametrar visas: - Antal varv (1/min) - Prestanda (Watt) - Energiförbrukning (kcal) - Sträcka (km) - Resterande träningstid (min)	
Vikt:	12-13 kg (beroende på utrustning)	
Övrigt:	Viktigt att ändra på komponentsbilden så att den blir utrustad med rätt utrustning.	


Tillbehör Thera Trainer Mobi

Samma som till Thera-Trainer activo 574

Motomed Loop

Leverantör:	Primed Fysio och Rehab AB	 Bentränare art.nr 430 62  Arm-och bentränare art.nr 430 63
Funktion:	- Passiv, aktiv eller assisterad rörelse. - Terapiprogram med möjlighet att sätta träningsmål - Träningfeedback i form av sträcka, symmetri, tonus, genomsnittlig och maximal aktiv effekt.	
Vikt:	Ca 30 kg	
Brukarvikt:	Max 135 kg	
Övrigt:	Kan höjjusteras 15 cm, utan verktyg. Levereras med vadvadstöd och snabbjusterande pedalradie	

Tillbehör Motomed Viva och Loop

<p>Stabiliseringsstag</p> <p>Art.nr 17076 Stabiliseringsstag för rullstol Justerbart i höjdlid mellan 70-104 cm.</p>	
<p>Funktionsvante</p> <p>Art.nr 16336</p>	
<p>Självjusterande fothållare Motomed Viva</p> <p>Art.nr 15162</p>	
<p>Självjusterande fothållare/quickfix till Loop</p> <p>Art.nr 43107</p>	
<p>Snabbjusterande pedalradie (Ingår på art.nr 15160 samt på Loop)</p> <p>Art.nr 33867 (Art.nr 33868 vid eftermontering på Motomed Viva)</p>	
<p>Stabiliseringsbälte</p> <p>Art.nr 42672 Används för att förankra rullstolen till Motomed:en.</p>	
<p>Förhöjningssats (ej till Loop)</p> <p>Art.nr 42671 Kan användas för att höja Motomed:en 7-15 cm.</p>	




Motomed Viva 2

Motomed Viva går ut i första hand, om de finns i lager, men köps inte längre in.

Art.nr 34850 Motomed Viva 2 Ben- och armtränare inkl. vadstöd

Art.nr 15160 Motomed Viva 2 Bentränare inkl. vadstöd och snabbjusterande pedalradie

Art.nr 18354 Motomed Viva 2 Armtränare

Leverantör:	Primed Fysio Och Rehab AB	 Bentränare art.nr 15160  Arm-och bentränare art.nr 34850  Armtränare art.nr 18354
Funktion:	<ul style="list-style-type: none">- Motordriven (passiv) rörelse/rotationsriktning, 1–60 varv/min.- Trampa aktivt eller trampa med motorassistans (servocykling)Spasmkontroll	
Övrigt:	Displayen kan visa Följande: <ul style="list-style-type: none">- Sträcka totalt [km]- Tid totalt [min:sek]- Genomsnittlig aktiv prestation- Total energiförbrukning [kJ]- Tonus- Symmetri vänster/höger [%]	

Tillbehör Motomed Viva


Se tillbehör till Motomed Viva och Loop

Övriga träningshjälpmedel


Samtliga nedanstående träningshjälpmedel är försäljningsartiklar.

Cylinderkudde


Cylinderkudden har övergått till egenansvar för patienten, men nedanstående produkter kan förskrivas i mån av tillgång.

Leverantör:	Medema	
Funktion:	Användbar kudde för användning under knä- och fotleder.	
Art.nr & storlek	02256, Cylinderkudde hård 10cm diameter 02257, Cylinderkudde hård 15cm diameter 02253, Cylinderkudde mjuk 10cm diameter	
Övrigt:	Alla kuddar är 50 cm långa och är försäljningsartiklar.	

Gymnastikmatta

Leverantör:	Medema	
Funktion:	Mattan kan även användas i vatten och är lätt att torka av. Latex och PVC fri.	
Artikelnr & storlek	Art.nr 02252, 100 x 184 x 1,5cm Art.nr 09400, 125 x 200 x 1,5cm Art.nr 11602, 60 x 185 x 1,5cm, grön	
Övrigt:	Måtten i produktnamn anger B x L x H. Är försäljningsartiklar.	

Kilkudde

Leverantör:	Bima, Medema, Tress	
Funktion:	Används vid positionering/avlastning	
Artikelnr & storlek	Art.nr 34360 Kilkudde 28 x 20 x 10cm Art.nr 10693 Kilkudde 50 x 50 x 20cm Art.nr 36475 Kilkudde 65 x 35 x 35cm Art.nr 34121 Kilkudde 90 x 60 x 32cm Art.nr 36179 Kilkudde 40 x 40 x 5cm	
Övrigt:	Måtten i produktnamn anger L x B x H. Är försäljningsartiklar.	