

Hjälpmiddelscentrum utbildar

# Styrsätt dator och surfplatta



**Kursansvarig hjälpmedelskonsulent**

Ulrika Eriksson

Telefon: 021-17 49 19

E-post: [ulrika.eriksson@regionvastmanland.se](mailto:ulrika.eriksson@regionvastmanland.se)

Louise Malmros Petitfrère

Telefon: 021-17 42 57

E-post: [louise.malmros.petitfrere@regionvastmanland.se](mailto:louise.malmros.petitfrere@regionvastmanland.se)

# HJÄLPMEDELSCENTRUM

Hässlö, Signalistgatan 2  
721 31 Västerås  
Kundtjänst: 021-17 30 48

Hjälpmedelskonsulent/leg. arbetsterapeut  
Ulrika Eriksson 021-17 49 19  
[ulrika.eriksson@regionvastmanland.se](mailto:ulrika.eriksson@regionvastmanland.se)

Hjälpmedelskonsulent/ leg. arbetsterapeut  
Louise Malmros Petitfrere 021-17 42 57  
[louise.malmros.petitfrere@regionvastmanland.se](mailto:louise.malmros.petitfrere@regionvastmanland.se)

Rehabingenjör  
Michael Larsson via kundtjänst 021-17 30 48  
[michael.larsson@regionvastmanland.se](mailto:michael.larsson@regionvastmanland.se)  
Område: Köping, Arboga, Kungsör,  
Hallstahammar, Surahammar,  
västra Västerås

Hjälpmedelstekniker  
Juha Goman via kundtjänst 021-17 30 48  
[juha.goman@regionvastmanland.se](mailto:juha.goman@regionvastmanland.se)  
Område: Fagersta, Sala,  
östra Västerås

<https://www.regionvastmanland.se/hmc>

<b>HJÄLPMEDELSHANDBOKEN</b> .....	1
<b>SORTIMENT</b> .....	2
TANGENTBORD.....	2
TANGENTBORD ALTERNATIV, SE INDIVIDÖVERSIKT.....	2
TANGENTBORD MINI TRÅDLÖS TILL IPAD SVARTA TANGENTER MED VIT TEXT .....	2
TANGENTBORD MINI TRÅDLÖS TILL IPAD VITA TANGENTER MED SVART TEXT .....	2
TANGENTBORD CLEVY STORA TANGENTER FÄRGKODADE .....	2
TANGENTBORD CLEVY STORA TANGENTER SVART/VIT .....	3
TANGENTBORD CHERRY MINI .....	3
TANGENTBORD MINI/TY FAST RASTER.....	3
TANGENTBORD MED LÅGT LÖST RASTER .....	3
TANGENTRAD X-KEYS 8 KNAPPAR PROGRAMMERBAR .....	4
TANGENTRAD X-KEYS 16 KNAPPAR PROGRAMMERBAR .....	4
TANGENTBORDSDEKALER GUL/SVART* .....	4
TANGENTBORDSDEKALER SVART/VITA VIT/SVARTA* .....	4
<b>PEKARHJÄLPMEDEL FÖR DATORER</b> .....	5
MUS ALTERNATIV, SE INDIVIDÖVERSIKT .....	5
KNAPPMUS STOR OCH LITEN.....	5
MUS CIRQUE EASY CAT TOUCHPAD, USB, PC & MAC .....	5
RULLBOLL MAXTRAC SVART.....	5
RULLBOLL KIDTRACK.....	6
RULLBOLL EXPERT TURBOMOUSE.....	6
RULLBOLL N-ABLAR USB.....	6
JOYSTICK POINT-IT .....	6
MUS INTEGRAMOUSE MUNSTYRNING .....	7
HUVUDSTYRNING HEADMOUSE EXTREME.....	7
ÖGONSTYRNING PCEYE 5 MED COMPUTER CONTROL.....	7
<b>INMATNINGSTILLBEHÖR</b> .....	8
BLÄCKFISKEN USB .....	8
<b>PROGRAMVARA FÖR INMATNING</b> .....	8
PROGRAM DRAGGER2 AUTOKLICK FÖR PC* .....	8
PROGRAM SAIDA ORDPREDIKTION* .....	8
PROGRAM SKIPPY ORDPREDIKTION.....	9
PROGRAM KEYVIT SKÄRMTANGENTBORD* .....	9
<b>ARMSTÖD SOM UNDERLÄTTAR AKTIVITET</b> .....	10
UNDERARMSSTÖD SMAL .....	10
UNDERARMSSTÖD BRED.....	10
UNDERARMSSTÖD FLEXIBLE .....	10

# HJÄLPMEDELSHANDBOKEN

[Hjälpmedelshandboken - Region Västmanland \(regionvastmanland.se\)](http://regionvastmanland.se)

## Hjälpmedelshandboken

Hjälpmedelshandboken är ett stöd för förskrivare av hjälpmedel och styr vilka hjälpmedel som kan förskrivas i Region Västmanland och länets kommuner, vilka kriterier som gäller vid förskrivning och vilka avgifter som tas ut.

Hjälpmedelshandboken bygger på **lagar, förordningar och föreskrifter** som reglerar hälso- och sjukvården generellt och hjälpmedelsområdet specifikt. Hjälpmedelshandboken är gemensam för samtliga hjälpmedelsområden och beslutas av politiker i regionstyrelsen eller hjälpmedelsnämnden.

Under rubriken Gemensamma bestämmelser finns information som gäller för samtliga hjälpmedelsområden. Övriga rubriker bygger på indelningen på 1177 Vårdguiden. Där beskrivs respektive hjälpmedel och de förutsättningar som gäller vid förskrivning. Hjälpmedel som hanteras av Hjälpmedelscentrum finns under flera olika rubriker.

Gemensamma bestämmelser	+
Rörelse	+
Träning, vård och behandling	+
Kognition och kommunikation	-
Minne, tid och planering	
Samtal, röst, tal, tele, läs och skriv	
Tyngdprodukter	
Hantering av föremål	
Larm	
Rådgivning eller anpassning av egenägd produkt	
I hemmet	+
Inkontinens	+

Sortimentet är föränderligt, dvs vad som finns att tillgå för tillfället och vi hittar alternativ efter behov.

## SORTIMENT

### TANGENTBORD

ISO-kod 22 36 03

#### **Kriterier för förskrivning**

Inmatningsenhet för dator kan förskrivas till patient som på grund av funktionsnedsättning inte kan använda ett vanligt tangentbord eller styrorgon.

#### **Förskrivare**

Arbetsterapeut och logoped.

#### **Tangentbord alternativ, se individöversikt.**

Efter kartläggning av behov kan HMC leta efter specifikt Tangentbord och köpa in det som personligt hjälpmedel. Patienten kan också komma med förslag hen vill prova.

S-36292

#### **Tangentbord mini trådlös till iPad svarta tangenter med vit text**

#### **Tangentbord mini trådlös till iPad vita tangenter med svart text**

Minitangentbord till iPad med förstörade tangenter som är särskilt framtaget för att möjliggöra för användare med svårigheter med finmotoriken att kunna skriva på iPads och iPhones.

OBS! Det är SVENSK layout på tangenterna! Bluetooth. Väger 315 gram.

Leverantör: Frölunda data

S-36710 Svarta tangenter med vit text

S-38942 Vita tangenter med svart text



#### **Tangentbord Clevy stora tangenter färgkodade**

Ett förstorat och förenklat tangentbord med stora färgkodade tangenter.

Leverantör: Frölunda data

S-17443

S-17444 Raster



### **Tangentbord Clevy stora tangenter svart/vit**

Ett förstorat och förenklat tangentbord med stora svarta/vita tangenter.

Leverantör: Frölunda data

S-34489

S-17444 Raster



### **Tangentbord Cherry Mini**

Tangentbord i liten storlek t ex för brukare med litet rörelseomfång. Mått 28x12 cm.

Leverantör: Frölunda data AB

S-13066



### **Tangentbord Mini/TY fast raster**

Tangentbord i liten storlek med fast raster. Mått 28x12 cm.

Leverantör: Frölunda Data AB

S-13241



### **Tangentbord med lågt löst raster**

Tangentbord i fullstor storlek med lågt löst raster i metall.

Leverantör: JCM Elektronik

S-42098



### **Tangentbord med högt fast raster**

Tangentbord i fullstor storlek med högt fast raster.

Leverantör: Frölunda Data

S-40616



**Tangentrad X-Keys 8 knappar programmerbar**  
**Tangentrad X-Keys 16 knappar programmerbar**

(båda har utgått leverantör men kan finnas på HMC:s lager)

Programmerbar extra knapprad för att lägga in funktioner och kommandon på.

8 och 16 knappar.

Leverantör: Saknas

S-36053 8 knappar

S-18316 16 knappar



**Tangentbordsdekaler gul/svart\***

**Tangentbordsdekaler svart/vita vit/svarta\***

Leverantör: Polar Print

S-15599 gul/svart

S-07417 svart7vit vit/svarta



## PEKARHJÄLPMEDEL FÖR DATORER

ISO-kod 22 36 21

Här ingår t ex datormus, joystick, huvudmus.

### Mus alternativ, se individöversikt

Efter kartläggning av behov kan HMC leta efter en specifik mus och köpa in det som personligt hjälpmedel. Patienten kan också komma med förslag hen vill prova.

S-13518

### Knappmus Stor och Liten

Mus som har åtta knappar för olika riktningar för att styra muspekaren. Ytterligare knappar för klickfunktioner och hastighet. Nedsänkta knappar.

Leverantör: Frölunda data

S-14834 stor

Storlek: Total yta 12 x 19,5 cm Knappar 2,5 cm i diameter.

S-16585 liten

Storlek: Total yta 10 x 17 cm Knappar 1,8 cm i diameter.



### Mus Cirque Easy Cat touchpad, USB, PC & Mac

En pekplatta som används istället för en mus. Fungerar på både PC och Mac.

S-12881



### Rullboll MaxTrac svart

En rullboll har samma funktion som en vanlig mus men hanteras omvänt, d v s den står still och man rullar en kula på ovansidan. Stora klickknappar, samt en låsknapp för dra-klickfunktion.

Leverantör: FrölundaData

S-36488





### Rullboll Kidtrack

En rullboll har samma funktion som en vanlig mus men hanteras omvänt, d v s den står still och man rullar en kula på ovansidan. Stora olikfärgade klickknappar, samt en låsknapp för dra- klickfunktion.

Leverantör: Funktionsverket

S-13068



Raster beställs på pappersordination med angivelse om hur rastret ska utformas.

Leverantör: HMC

S-14876 raster

### Rullboll Expert Turbomouse

Rullboll med fyra programmerbara knappar för olika snabbkommandon. Runt styrkulan finns en ring med scrollningsfunktion. Har en handlovs kudde för ergonomisk avlastning.

Programvara medföljer om man vill ändra knapparnas innehåll.

Leverantör: Rehabcenter AB

S-17478



### Rullboll n-ABLAR USB

Rullboll. Position på vänster- högerklick kan bytas. Anti-darrningsknapp. Muspekaren styrs lätt och exakt med liten kraft. Fyra inställbara hastigheter för markörförflyttning.

Leverantör: Frölunda Data

S-36358



### Joystick Point-it

(utgått leverantör men kan finnas på HMC:s lager)

Lättmanövrerad joystick med pinn- eller kulgrepp för muspekning. Fyra olika knappar för vänster-, höger- och dubbelklick samt hastighet. Två utgångar för externa manöverkontakter för utdragen klickfunktion.

Leverantör: Abilia AB

S-14318 med pinne

S-16347 med kula



### **Mus Integramouse Munstyrning**

En fullvärdig datormus som manövreras enbart med munnen, små läpprörelser och sug/ blåser alla musfunktioner.

Leverantör: Frölunda data AB

S-16116



### **Huvudstyrning Headmouse Extreme**

Alternativt styrsätt där man genom att fästa en Reflexpunkt i pannan eller på glasögonbåge kan styra muspekaren. Ingen programvara krävs, fungerar till alla datorer. Lätt att fästa på bildskärm, fungerar på stationär och bärbar dator. Möjlighet att ansluta externa kontakter för klickfunktion. Alternativt kan en programvara för klickfunktion förskrivas; Program Dragger s-0970. Kombinerar ofta med programvara Tangentbord på skärm.

Leverantör: Rehabcenter AB

S-14478

S-11855 reflexpunkter extra\* lagervara



### **Ögonstyrning PCEye 5 med Computer Control**

Fristående ögonstyrningsenhet som ansluts till datorns USB-port. PC Eye Plus rekommenderas upp till 27"-skärmar, har ett uttag så man kan koppla in en manöverkontakt samt har en mikrofon. Med Computer Controlstyrning. För såväl inom-som utomhusbruk.

Leverantör: Tobii

S-41989



**För alternativa styrsätt till surfplatta eller telefon,  
kontakta hjälpmedelskonsulent.**

# INMATNINGSTILLBEHÖR

ISO-kod 22 36 15

Avser manöverkontakter för att kunna sätta på eller stänga av strömkretsar.

## Bläckfisken USB

Används för att enkelt kontaktstyra en dator. Genom att koppla olika manöverkontakter till dosan kan man utföra olika tangentbordskommandon genom tryckning. Dosan kopplas till datorn via USB-porten. Bläckfisken har 7 ingångar för kontakter med liten telepropp t ex Specs- eller Jellybeankontakt. Samtliga ingångar är vid leverans standardinställda med de vanligaste använda tangenterna, men kan ändras om så önskas, detta görs med hjälp av en tillhörande programvara. Fungerar enkelt för att kontaktstyra pedagogiska program för lek och inläring men även för att styra program för ordbehandling och kommunikation.  
Leverantör: Hargdata AB

S-17477



# PROGRAMVARA FÖR INMATNING

ISO-kod 22 36 18

Här ingår bland annat tangentbord på skärm och program som ersätter musfunktioner.

## Program Dragger2 Autoklick för PC\*

Program för automatisk klick med hö och vänster musknapp. Används av personer som inte kan hantera musens knappar. Används ofta tillsammans med styrsättet Huvudmus.  
Leverantör: Rehabcenter AB

S-35805




## Program Saida ordprediktion\*

Ett program som lämnar förslag på ord som kan skrivas. Sparar tangenttryckningar vid skrivande. Fungerar ihop med alla Windows program. Förstahandsval.  
Leverantör: Oribi

S-14352



Hejl!  
Tack för senast.  
Det vore gette

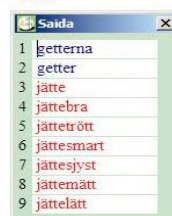

## Program Skippy ordprediktion

Ett ordprediktionsprogram dvs ett program som lämnar förslag på ord som kan skrivas. Kan spara omkring hälften av tangenttryckningarna vid skrivande. Fungerar ihop med alla Windows program. Andrahandsval om ej SAIDA fungerar till datorn.

Leverantör: Rehabcenter

S-16164

S-17483 Skippy extralicens beställningsvara



## Program KeyVit Skärmtangentbord\*

Andrahandsval om Wivik ej fungerar. Program som helt kan ersätta det ordinarie tangentbordet. Tangentbordet syns på datorskärmen och styrs genom att muspekaren förs över och markerar på respektive tangent. Kan även användas med scanning och då styrs med kontakter.

Leverantör: Rehabcenter AB

S-15581

S-17484 KeyVit extralicens



## ARMSTÖD SOM UNDERLÄTTAR AKTIVITET

ISO-kod 24 18 27

Hjälpmiddel som stöder underarmen vid manuella aktiviteter, till exempel vid en dator eller vid en skrivmaskin.

### Kriterier för förskrivning

Kan förskrivas för att uppnå ergonomisk arbetsställning vid arbete vid till exempel dator.

### Förskrivare

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast.

### Underarmsstöd smal

Leverantör: Ergoff AB

S-13164



### Underarmsstöd bred

Leverantör: Ergonomiprodukter Sverige AB

S-13166



### Underarmsstöd Flexible

Leverantör: Ergoff AB

S-35992

