

Hjälpmedelscentrum utbildar

# Eldrivna rullstolar med manuell direktstyrning

**Kursansvarig hjälpmedelskonsulent**

**Karin Hjelte**

Tel: 021-174467 [karin.hjelte@regionvastmanland.se](mailto:karin.hjelte@regionvastmanland.se)

**Helena Lagerbäck**

Tel: 021-174466 [helena.lagerback@regionvastmanland.se](mailto:helena.lagerback@regionvastmanland.se)

**Jenny Ridderstolpe**

Tel: 021-176661 [jenny.ridderstolpe@regionvastmanland.se](mailto:jenny.ridderstolpe@regionvastmanland.se)

Våren 2022

### Förskrivningsprocessen för eldrivna rullstolar

<p>Förskrivning av 3-hjulig elrullstol/ manuell styrning <b>utan</b> hjälpmedelskonsulent Ex. Fortress Calypso, Sterling Elite 2 plus</p>	<p>Förskrivning av elrullstol med avancerat sittande eller styrsätt. Utprovning sker tillsammans <b>med</b> hjälpmedelskonsulent</p>
<p>Ärendet startar när förskrivarens bedömning styrker patientens behov av elrullstol och att patienten uppfyller kriterierna för elrullstol enligt <i>Hjälpmedelshandboken</i>.</p>	
<p>Förskrivaren går tillsammans med patienten igenom <i>Underlag för utprovning av elrullstol, Information när du får låna elrullstol</i> samt <i>Lånevillkor</i> och <i>Blankett för körträning</i>. Förskrivaren bedömer om godkänd förvaring finns alt. startar ärende för BAP. Förskrivaren bedömer om tveksamheter föreligger för patienten att framföra elrullstolen på ett säkert sätt och kan begära in <i>Medicinsk bedömning för elektrisk rullstol av patientansvarig läkare</i>.</p>	
<p>Förskrivaren kontaktar kundtjänst och bokar aktuell elrullstol som finns i utställningen. Nyckel hämtas i kundtjänst. Rum bokas vid behov. Patient och förskrivare träffas på Hjälpmedelscentrum för utprovning, det är ett krav innan förskrivning.</p>	<p>Ladda ner blankett <i>Underlag för utprovning av elrullstol</i> från webSesam – Allmän info eller Vårdgivarwebben. Fyll i efterfrågade uppgifter. I webSesam bifogas underlaget till arbetsorder-utprovning elrullstol. Se Sesaminstruktion Arbetsorder, Utprovning och Specialanpassning länk nedan</p>
<p>Förskrivaren går igenom <i>Information när du får låna elrullstol och lånevillkor</i> med patienten, där förskrivaren fyllt i elrullstolens värde. Patient skriver under lånevillkor och en kopia skickas till Hjälpmedelscentrum.</p> <p>Förskrivaren lägger elrullstolsordination i webSesam, med ev. komponenter. För leverans till patient, välj patient och Hemleverans skrymmande hjälpmedel till hemadressen. Se till att uppgift om telefonnummer och ev. kontaktperson är korrekt. Alternativt välj Kund och Turbil till förskrivare/beställare.</p> <p>I fältet <b>Övrig information</b> fyll i om önskemål av viss sitthöjd önskas eller om nyckel skall levereras till annan än patient.</p>	<p>Hjälpmedelskonsulenten kontaktar förskrivaren och bokar en utprovningstid på Hjälpmedelscentrum eller i patientens hemmiljö. Vid utprovningen går förskrivaren igenom <i>Information när du får låna elrullstol och lånevillkor</i>, där hjälpmedelskonsulent fyller i elrullstolens värde. Efter utprovning lägger hjälpmedelskonsulent beställning på överenskommen elrullstol. Ordinerad elrullstol är rekonditionerad/begagnad elrullstol eller nybeställd beroende på behov och tillgång. Ytterligare utprovningstillfällen kan vara nödvändiga. Hjälpmedelskonsulent beställer transport av elrullstol enligt förskrivarens önskemål.</p>
<p><b>Utleverans av elrullstol kan inte ske innan godkänd förvaringsplats finns tillgänglig.</b></p>	
<p>Förskrivaren ansvarar för körträning med patienten i dess närmiljö till dess att förskrivaren bedömer att patienten klarar av att framföra elrullstolen på ett säkert sätt för sig själv och andra.</p>	
<p>Förskrivaren ansvarar för löpande uppföljning av patientens användande av elrullstol. Blankett <i>Uppföljning av elrullstol</i> finns att tillgå. Elrullstolen ska användas kontinuerligt under hela året och behovet ska motsvara en körtid på <b>minst 50h/år</b>.</p>	



### **Fortress Calypso**

**Firma: Sunrise medical**

Ej avtalsstol – inga nyinköp

Klass: B5 Begränsad utomhusanvändning, enkel sittkomfort

Hindertagning	7,5 cm
Högsta brukarvikt	125 kg
Körsträcka	30 km
Hastighet	10 km/h,
Stolens vikt	100 kg inklusive batterier
Totallängd	121 cm
Totalbredd	63 cm
Sitthöjd	43-49 cm (3 nivåer)

För att ändra sitthöjd behövs 13mm nyckel och 6 mm insexnyckel.

Lyft bort sitsen rakt upp. Lossa främre kåpan som sitter fast med kardborrband. Lossa skruven på bakre kåpan. Lossa bakre kåpan som sitter med kardborrband. Lossa muttern på sittstolpen och dra ur bulten. Välj sitthöjd, sätt i bulten och dra åt muttern. Sätt på bakre kåpan. Sätt tillbaka skruven i bakre kåpan. Sätt på främre kåpan. Lyft i sitsen.

Anteckningar: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## Fortress Calypso

Firma: Sunrise medical

Sesamnummer:

Elrullstol Calypso inkl korg och säte. S-324 38

Inställning Gasgrepp, sitsvridning, nyckellås Hö sida S-351 78

Inställning Gasgrepp, sitsvridning, nyckellås Vä sida S-351 79

Laddare TC Switch S-15634

Backspegel Vä S-324 40

Backspegel Hö S-324 41

Kom ihåg att välja *inställning* när kryckkäpphållare eller syrgashållare beställs!

Kryckkäpphållare S-324 39

Inställning Kryckkäpphållare Hö S-351 74

Inställning Kryckkäpphållare Vä S-351 75

Syrgashållare S-329 62

Inställning Syrgashållare Hö S-351 76

Inställning Syrgashållare Vä S-351 77

För leverans till förskrivares lager välj Kund och Turbil till förskrivare/beställare.

För leverans till patient, välj patient och Hemleverans skrymmande hjälpmedel till hemadressen.

Patientuppgifter med adress och telefonnummer samt eventuell **uppgifter om kontaktperson** ska vara korrekta, det är viktigt eftersom Leveransplaneraren tar kontakt med patienten dagen innan utleverans. Om HMC inte får kontakt med patient/kontaktperson dagen innan förskjuts leveransen.

I fältet Övrig information ska anteckningar göras om det finns önskemål om att nyckeln ska levereras till annan än patienten, eller tex att en viss sitthöjd ska vara inställd. Ange var elrullstolen ska ställas av transport tex i förråd eller bostaden.

Anteckningar: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



### **Elite2 Plus**

**Firma: Sunrise Medical**  
Avtalsstol

Klass: C2 Utomhusanvändning, enkel sittkomfort

Hindertagning:	10 cm
Högsta brukarvikt:	175 kg
Körsträcka	30 km
Hastighet	10 km/h
Stolens vikt	140 kg inklusive batterier
Totallängd	139 cm
Totalbredd	65 cm
Sitthöjd	44-54 cm

För att ändra sitthöjd behövs 2 st 17mm nyckel.

Lyft av sitsen rakt upp. Ta bort främre kåpan genom att lossa gummistroppen. Sitsstolpen kan justeras på höjden i 4 lägen. Skruva bort de två skruvarna och muttrarna. Placera dem i önskad position och dra åt muttrarna. Sätt tillbaka främre kåpan och lyft i sitsen.

Standardhastigheten är 10 km/h, om särskilda skäl för högre hastighet (15km/h) finns, kontakta hjälpmedelskonsulent för bedömning och eventuell höjning.

Anteckningar: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## Elite2 Plus

Firma: Sunrise Medical

Sesamnummer:

Elite 2 plus inkl. korg och säte	S-349 48
Inställning Gasgrepp, sitsvridning, nyckellås Hö	S-351 67
Inställning Gasgrepp, sitsvridning, nyckellås Vä	S-351 80
Inställning hastighet 10 km/h	S-36297
Inställning hastighet 15 km/h	S-36298
Laddare TC Switch	S-15634
Backspegel Hö.	S-349 54
Backspegel Vä.	S-349 53

Kom ihåg att välja *inställning* när kryckkäpphållare eller syrgashållare beställs!

Kryckkäpphållare	S-349 55
Inställning Kryckkäppshållare Hö	S-351 61
Inställning Kryckkäppshållare Vä	S-35162

Syrgashållare 107 mm inkl. fäste	S-169 16
Syrgashållare 119 mm inkl. fäste	S-349 57
Inställning Syrgashållare Hö	S-351 63
Inställning Syrgashållare Vä	S-351 64

För leverans till förskrivares lager välj Kund och Turbil till förskrivare/beställare.

För leverans till patient, välj patient och Hemleverans skrymmande hjälpmedel till hemadressen.

Patientuppgifter med adress och telefonnummer samt eventuell **uppgifter om kontaktperson** ska vara korrekta, det är viktigt eftersom Leveransplaneraren tar kontakt med patienten dagen innan utleverans. Om HMC inte får kontakt med patient/kontaktperson dagen innan förskjuts leveransen.

I fältet Övrig information ska anteckningar göras om det finns önskemål om att nyckeln ska levereras till annan än patienten, eller tex att en viss sitthöjd ska vara inställd. Ange var elrullstolen ska ställas av transport tex i förråd eller bostaden.

Anteckningar: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



### **Mini Crosser M1**

**Firma: Minicrosser**

Ej avtalsstol- inget nyinköp

Utomhusanvändning, enkel sittkomfort.

Hindertagning	12,0 cm
Högsta brukarvikt	175 kg
Körsträcka	30 km
Hastighet	15 km/h
Stolens vikt	151 kg inklusive batterier
Totallängd	135 cm
Totalbredd	66 cm
Sitthöjd	52-62 cm

Ändra sitthöjd, inga verktyg behövs, finns 5 lägen.

Lyft av sätet rätt upp. På stolpen finns en spärr med svart hatt. Tryck in spärren så att den fjädrar ut. Reglera stolpen till önskad höjd. Tryck in spärren i botten. Lyft tillbaka sätet i stolpen.

Anteckningar: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## Mini Crosser M1

Firma: Minicrosser

Sesamnummer: Minicrosser M1 inkl. korg S-323 66 OBS! exkl. säte

Eblo säte S-347 65

Inställning Gasgrepp, sitsvridning, nyckellås Hö S-351 72

Inställning Gasgrepp, sitsvridning, nyckellås Vä S-351 73

Inställning hastighet 10 km/h S-36297

Inställning hastighet 15 km/h S-36298

Laddare TC Switch S-15634

Backspegel höger S-323 69

Backspegel vänster S-323 70

Kom ihåg att välja *inställning* när kryckkäpphållare eller syrgashållare beställs!

Kryckkäppshållare dubbel S-323 71

Inställning Kryckkäppshållare Hö S-351 68

Inställning Kryckkäppshållare Vä S-351 69

Syrgashållare S-329 63

Inställning Syrgashållare Hö S-351 70

Inställning Syrgashållare Vä S-351 71





Mini Crosser M2

Firma: Minicrosser

Ej avtalsstol- större modell, avancerat sittande med Ergosäte i olika sittbredder.

Kan också utrustas med sitslyft.

Utomhusanvändning, avancerad sittkomfort

OBS! M2 är inte förskrivningsbar i webSesam. Utprovning sker tillsammans med konsulent. Befintlig M2 kan kompletteras med tillbehör via webförskrivning.

Hindertagning	11,0 cm
Högsta brukarvikt	175 kg
Körsträcka	30 km
Hastighet	15 km/h
Stolens vikt	151 kg inklusive batterier
Totallängd	135 cm
Totalbredd	68 cm
Sitthöjd	52-62 cm

Anteckningar: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Mini Crosser M2

Firma: Minicrosser

Sesamnummer:

Minicrosser M2 inkl. korg. Finns i sittbredd: 40, 45, 50 och 55cm.

Backspegel Hö S-323 69

Backspegel Vä S-323 70

Kryckäppshållare dubbel S-323 71

Inställning Kryckäppshållare Hö S-351 68

Inställning Kryckäppshållare Vä S-351 69

Syrgashållare S-329 63

Inställning Syrgashållare Hö S-351 70

Inställning Syrgashållare Vä S-351 71

Anteckningar: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_