



Sitthöjdstabell Cross 6

Bakre sitthöjdstabell

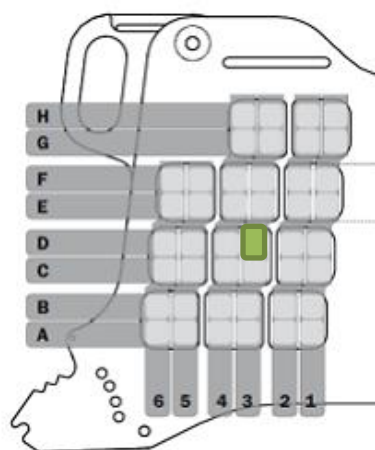


Bak

Fram

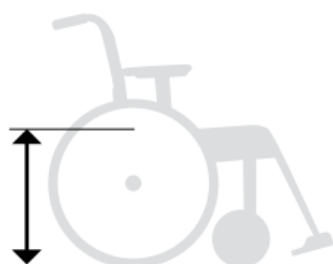

Sitshöjd

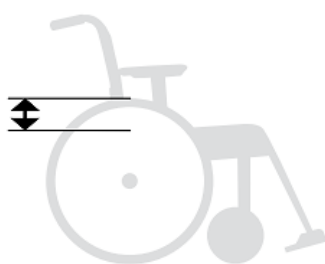

Avstånd sits-drivhjul

Bakre sitshöjdstabell			
	Drivhjul	Sitshöjd cm	Avstånd cm sits-drivhjul
Position A	20"	46	4.5
	22"	48.5	7.0
	24"	51	9.5
	26"	53,5	12
Position B	20"	44	6.5
	22"	46.5	9.0
	24"	49	11.5
	26"	51,5	14
Position C	20"	42	8.5
	22"	44.5	11.0
	24"	47	13.5
	26"	49,5	16
Position D	20"	40	10.5
	22"	42.5	13
	24"	45	15.5
	26"	47,5	18
Position E	20"	38	12.5
	22"	40.5	15
	24"	43	17.5
	26"	45,5	20
Position F	20"	36	14.5
	22"	38.5	17
	24"	41	19.5
	26"	43,5	22
Position G	20"	34	16.5
	22"	36.5	19
	24"	39	21.5
	26"	41,5	24
Position H	20"	32	18.5
	22"	34.5	21
	24"	37	23.5
	26"	39,5	26


Grön markering anger standardinställning

Drivhjul Cross5/Cross6/Prio 20t qr massivt utan drivring	S-35426
Drivhjul Cross 5/Cross 6/Prio 22t qr massiva utan drivring	S-35425
Drivhjul Cross 5/Cross 6/Prio 24t qr massiva utan drivring	S-35424
Drivring Cross 17t metall clipsmonterad	S-07062
Drivring Cross 19t metall clipsmonterad	S-03503
Drivring Cross 21t metall clipsmonterad	S-05578

Drivhjul Cross 5/Cross 6 20t qr för vårdarbroms, alu-drivring	S-36447
Drivhjul Cross 5/Cross 6 22t qr för vårdarbroms, rfr-drivring	S-35930
Drivhjul Cross 5/Cross 6 24t qr för vårdarbroms, rfr-drivring	S-17325

Främre sitthöjdstabell

Sitthöjdsjustering genom byte av framgaffel/länkhjul

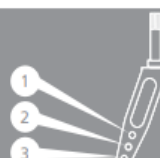		Främre sitthöjdstabell												
														
		Länkhjulsposition (cm)												
		Gaffel extra kort			Gaffel Kort			Gaffel Medium			Gaffel Lång			
Drivhjuls- position	Länk- hjul	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Lågt framgaffelfäste	H	4"*	32-36	33.5-37.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	G	4"*	-	34-38	35.5-39.5	-	-	-	-	-	-	-	-	
	G	5"	-	-	-	36-40	37.5-41.5	-	-	-	-	-	-	
	A-F	5"	-	-	-	36-40	37.5-41.5	39-43	-	-	-	-	-	-
		6½"	-	-	-	-	-	41-45	-	-	-	-	-	-
Standard/ Breddat framgaffelfäste	A-F	5"	-	-	-	37.5-41.5	39-43	40.5-44.5	43-46	45-48	46-49	-	-	
		6½"	-	-	-	-	41-45	42.5-46.5	46-48	47-49	48-51	50.5-52.5	51.5-53.5	52.5-55.5
	A-E	6"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	A-C	8"*	-	-	-	-	-	-	-	48-51	49-52	-	52.5-54.5	53.5-56.5

* Max brukarvikt 100 kg.

För korrekt inställning av framgaffelfästet: Max bakåtvinkling 6 cm högre fram än bak (9°), max framåtvinkling 2 cm lägre fram än bak (3°).

** Fungerar i balansering 4-6 med 3° bakåtvinkel och Std benstöd. Se till att gaffel/länkhjul kan rotera fritt utan att slå i rullstol eller brukare. För länkhjul 8x2", använd gaffel Transit (ger sitshöjd 47-51 cm).

Länkhjul Cross 5t 125x30 massivt S-11154

Länkhjul Cross 6,5t 165x30 massivt S-02841

Framgaffel Cross kort S-01123

Framgaffel Cross medium S-01124

Vid behov av extra låg eller extra hög sitthöjd (4t eller 8t länkhjul) – kontakta hjälpmedelskonsulent.