

Påminnelse - nya provtagningsrör för odling av bakterier

Laboratoriemedicin har övergått till nya provtagningsrör för odling av bakterier och från och med 1 november 2020 kommer endast de nya rören att accepteras.

Övergången till vätskebaserat transportmedium (eSwab) för odling av bakterier möjliggör automatiserad utodling.

Förändringen omfattar även provtagningsrör för urinodlingar. Nedan visas de urinrör som ska användas.

Under en övergångsperiod har även andra rör än de som visas nedan tagits emot men detta upphör alltså 1 november 2020.

Undantag: Det finns leveransstörning av Eswab blå kork därför kommer prover som är tagna på det gamla sättet (lång pinne blå kork med svart medium) tas emot även efter 1 november.

<p>eSwab med rosa kork används vid provtagning från lokaler som till exempel: sår, urogenital och svalg samt för MRG/ESBL-screening.</p>	
<p>eSwab med blå kork används vid provtagning från mindre åtkomliga lokaler som till exempel: NPH, uretra, cervix, öra och öga.</p>	
<p>Sterilt provrör med gul kork (Sarstedt) Används till urinodling. Röret ska fyllas 8-10 mL.</p>	
<p>Vakuumbör med beige kork (Kima vacutest) Används till urinodling. Röret ska fyllas till vakuomet i röret tar slut.</p>	

Daniel Heimer
Överläkare
Klinisk mikrobiologi
Laboratoriemedicin

Camilla Svensson
Processledare Allmän odling

Laboratoriemedicin
021-17 50 97
camilla.svensson@regionvastmanland.se

Mer information finns på:

[Laboratoriemedicin – Region Västmanland](#)